

medical

DEZINFECTANȚI
PROFESIONALI



mâini și tegumente
suprafețe și pardoseli
echipamente și instrumentar
microaerofloră

Klintensiv[®]

Klintensiv®



— Fondată în anul 2011, cu capital integral românesc, compania noastră are ca activitate curentă producția și comercializarea a trei game de produse: **Klintensiv®** – *dezinfecțanți profesionali*, **Davera** – *produse de curățenie* și **Klintensiv® Beauty** – *produse de îngrijire corporală*.

— Misiunea noastră este de a oferi produse de înaltă calitate, bazate pe înțelegerea nevoilor clienților și a provocărilor epidemiologice curente, asigurând la standarde de nivel medical menținerea unui climat corespunzător de siguranță și sănătate la locul de muncă și acasă.

— Credem cu tărie în cercetare, inovare și performanță cu resurse autohtone, oferind clienților noștri produse variate, complementare, caracterizate de un standard de calitate superior, similar celor din economiile dezvoltate din UE.

— Toți dezinfecțanții pe care îi comercializăm sunt avizați de Ministerul Sănătății, iar procesul de producție este certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 și OHSAS 18001.

— Fiecare lot de produse este testat de un laborator independent autorizat, Klintensiv® fiind singurul producător din România care realizează aceste testări.

— **Klintensiv® este cel mai vândut brand în instituțiile și spitalele din România în 2020.**



MĂINI ȘI TEGUMENTE

ALCHOSEPT®	Dezinfectant pentru mâini și tegumente	5
KLINTENSIV®	Gel dezinfectant pentru mâini	6
DAVERA® SOAP	Săpun lichid antimicrobian	7
KLINTENSIV®	Șervețele umede dezinfectante pentru mâini	8
KLINTENSIV®	Alcool sanitar	9
NAPKLIN WIPES™	Șervețele umede dezinfectante, pe bază de alcool	10



SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI

KLINTENSIV®	Dezinfectant suprafețe, gata de utilizare	13
KLINTENSIV®	Șervețele umede dezinfectante pentru suprafețe	14
KLINTENSIV®	Detergent dezinfectant concentrat	15
SOLIKLOOR®	Dezinfectant clorigen tablete, cu spectru larg de acțiune	16
KLINOSEPT®	Dezinfectant rapid suprafețe, pe bază de alcool	17
KLINOMED™	Șervețele dezinfectante, pe bază de alcool	18
GLUTACIDE®	Dezinfectant concentrat pentru suprafețe și dispozitive	19
GLUTANOL™	Dezinfectant de nivel înalt, cu activator RTU	20
KLINTENSIV® 3-AMINO	Dezinfectant concentrat pentru suprafețe dure	21
KLINTENSIV® FIZZY TABLET	Tablete efervescente clorigene	22



ECHIPAMENTE ȘI INSTRUMENTAR

STERISOL™	Dezinfectant de nivel înalt RTU	25
SPORCYDE®	Dezinfectant concentrat de nivel înalt	26
KLINTENSIV®	Dezinfectant concentrat pentru instrumentar	27
GLUTACARE™	Dezinfectant de nivel înalt, pentru instrumentar	28
KLINTENSIV® DIAMINE	Dezinfectant concentrat	29
KLINOZYME™	Detergent enzimatic pentru instrumentar	30
KLINTENSIV® QUAT WIPES	Șervețele umede dezinfectante pentru suprafețe	31
KLINTENSIV® DEZICON	Dezinfectant concentrat de nivel înalt	32



MICROAEROFLORĂ

DESOGEN® Aero	Dezinfectant microaerofloră	35
AMBIOCIDE®	Dezinfectant microaerofloră RTU	36



MÂINI ȘI TEGUMENTE

ALCHOSEPT®	Dezinfectant pentru mâini și tegumente	5
KLINTENSIV®	Gel dezinfectant pentru mâini	6
DAVERA® SOAP	Săpun lichid antimicrobian	7
KLINTENSIV®	Șervețele umede dezinfectante pentru mâini	8
KLINTENSIV®	Alcool sanitar	9
NAPKLIN WIPES®	Șervețele umede dezinfectante, pe bază de alcool	10



ALCHOSEPT®

Dezinfectant pentru mâini și tegumente



40 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litru



DESCRIERE

ALCHOSEPT® este un dezinfectant profesional pentru mâini și tegumente, cu acțiune rapidă, recomandat pentru utilizare frecventă în cabinetele medicale în vederea dezinfectării înainte și după fiecare contact cu pacienții. Substanțele protectoare și hidratante mențin echilibrul lipidic al pielii.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Efect imediat și rezidual foarte bun;
- Toleranță excelentă a epidermei la utilizare îndelungată;
- Recomandat pentru dezinfectare igienică sau chirurgicală a mâinilor;
- Se usucă rapid și nu necesită clătire;
- Nu lasă o senzație lipicioasă pe piele, după aplicare;
- Acțiune virucidă și bactericidă certificată;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Etanol, concentrație în unități metrice 85%.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Se utilizează ca atare pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor.

Mod folosire: Pentru dezinfectarea igienică a mâinilor: se aplică 3 ml și se freacă mâinile timp de 30 secunde. Pentru dezinfectarea chirurgicală a mâinilor: se aplică 3 ml, se freacă mâinile timp de 1 minut, apoi se mai adaugă 3 ml și se freacă mâinile din nou, timp de 2 minute. Recomandăm ca, înainte de utilizare, să îndepărtați bijuteriile sau accesoriile aflate pe mâini. De asemenea, este important ca, înainte de aplicarea produsului, pielea mâinilor să fie curată și uscată.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- În instituții de spitalizare, săli de operații, secții de terapie intensivă și de boli infecțioase;
- În transport și tratament ambulatoriu sau de urgență;
- În laboratoare;
- În bucătăriile de spital și cantine;
- În practici medicale pentru toate disciplinele;
- În îngrijirea la domiciliu a pacienților.

Aviz emis de Comisia Națională pentru Produse Biocide:
Nr. 4217BIO/01/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericidă	SR EN 1500, SR EN 13727, SR EN 1276	30 secunde
Bactericidă	SR EN 12791	3 x 60 secunde
Levuricidă	SR EN 1650	30 secunde
Fungicidă, Levuricidă	SR EN 13624	60 secunde
Micobactericidă, Tuberculocidă	SR EN 14348	60 secunde
Virucidă	SR EN 14476	1-2 minute

KLINTENSIV®

Gel dezinfectant pentru mâini



40 ml, 500 ml, 1 litru

DESCRIERE

KLINTENSIV® gel dezinfectant asigură igienizarea mâinilor în orice moment al zilei, fiind disponibil și în varianta mini (pentru confort și mai multă ușurință în utilizare). Dezinfectează eficient și acționează rapid. Hidratează fără a lăsa senzația de piele uscată sau crăpată.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Efect imediat și rezidual foarte bun;
- Toleranță excelentă a epidermei la utilizare îndelungată;
- Recomandat pentru dezinfectare igienică sau chirurgicală a mâinilor;
- Se usucă rapid și nu necesită clătire;
- Nu lasă o senzație lipicioasă pe piele, după aplicare;
- Acțiune virucidă și bactericidă certificată;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Etanol, concentrație în unități metrice 85%.



INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Se utilizează ca atare pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor.

Mod folosire: Pentru dezinfectarea igienică a mâinilor: se aplică 3 ml și se freacă mâinile timp de 30 secunde. Pentru dezinfectarea chirurgicală a mâinilor: se aplică 3 ml, se freacă mâinile timp de 1 minut, apoi se mai adaugă 3 ml și se freacă mâinile din nou, timp de 2 minute. Recomandăm ca, înainte de utilizare, să îndepărtați bijuteriile sau accesoriile aflate pe mâini. De asemenea, este important ca, înainte de aplicarea produsului, pielea mâinilor să fie curată și uscată.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- În instituții de spitalizare, săli de operații, secții de terapie intensivă și de boli infecțioase;
- În transport și tratament ambulatoriu sau de urgență;
- În laboratoare;
- În bucătăriile de spital și cantine;
- În practici medicale pentru toate disciplinele;
- În îngrijirea la domiciliu a pacienților.

Aviz emis de Comisia Națională pentru Produse Biocide:
Nr. 2251BIO/01/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericidă	SR EN 1500, SR EN 13727	30 secunde
Bactericidă	SR EN 12791	3 x 60 secunde
Fungicidă, Levuricidă	SR EN 13624	60 secunde
Micobactericidă, Tuberculocidă	SR EN 14348	60 secunde
Virucidă	SR EN 14476	1-2 minute

DAVERA® SOAP

Săpun lichid antimicrobian



500ml, 1L, 5L

DESCRIERE

DAVERA® SOAP săpun lichid antimicrobian săpun lichid antimicrobian este un produs utilizat pentru dezinfectia igienică a mâinilor, spălarea și dușul pre și postoperator al corpului. Este utilizat în mod obișnuit la chiuvetele clinice și în băile pacienților pentru duș. Este des utilizat în domenii profesionale, în care igiena frecventă a mâinilor este esențială pentru desfășurarea activității.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Săpun lichid antimicrobian certificat biocid (2% clorhexidină);
- Recomandat pentru utilizare regulată;
- Delicat cu pielea (chiar și până la 50 utilizări/zi);
- Potrivit pentru dezinfectare igienică a întregului corp;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Acid D-gluconic, compus cu N,N'-bis (4-clorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradecanediamidină (2:1) (CHDG), concentrație în unități metrice 2%.



INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Se utilizează pentru dezinfectarea igienică a mâinilor, prin spălare. Spălarea și dușul pre și postoperator al corpului.

Mod folosire: Înainte de a începe procedura de spălare a mâinilor, bijuteriile și accesoriile trebuie îndepărtate. Apoi, se vor respecta toți pașii de spălare corespunzătoare a mâinilor, conform OMS.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- În toate zonele spitalicești și în cabinetele/ centrele medicale;
- În căminele de bătrâni;
- Adecvat pentru îngrijirea la domiciliu;
- În industrie și laboratoare.

Aviz emis de Comisia Națională pentru Produse Biocide:
Nr. 4218BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bacterică	SR EN 1499, SR EN 13727	60 secunde
Levurică	SR EN 13624	60 secunde
Micobactericid, tuberculocid	SR EN 14348	60 secunde

KLINTENSIV®

Șervețele umede dezinfectante pentru mâini



15, 40, 70 buc/pachet



DESCRIERE

KLINTENSIV® șervețele umede dezinfectante pentru mâini sunt ideale pentru îmbunătățirea curățării mâinilor pacientului. Cu o formulă puternică, șervețelele antimicrobiene pentru mâini sunt adecvate pentru utilizare frecventă. Acționând în decurs de 60 secunde, pentru a inactiva 99,99% din germeni, acestea reduc riscul de infecție și ajută la menținerea sănătății pielii.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Efect dezinfectant rapid (timp de acțiune 60 secunde);
- Eficiență ridicată (distruge peste 99% dintre bacterii);
- Adecvat pentru utilizare zilnică și frecventă;
- Conține substanțe dezinfectante cu acțiune levuricădă, și bactericădă;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Compuși cuaternari de amoniu, benzil-C12-16

-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 1%;

Acid D-gluconic, compus cu N,N"-bis (4-clorofenil) -3,12

-diimino-2,4,11,13-Tetraazatetradecanedi amidină,

concentrație în unități metrice 0,2%.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Igienizare mâini.

Mod folosire: Pentru o dezinfectare rapidă, se freacă mâinile cu șervețele KLINTENSIV, timp de 60 secunde.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- În toate zonele spitalicești și în cabinetele/ centrele medicale;
- În căminele de bătrâni;
- Adecvat pentru îngrijirea la domiciliu;
- În industrie și laboratoare.

**Aviz emis de Comisia Națională
pentru Produse Biocide:
Nr. 5551BIO/01/12.24**

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericădă	SR EN 1499, SR EN 1500, SR EN 13727	60 secunde
Levuricădă	SR EN 13624	60 secunde
Bactericădă	SR EN 1276	5 minute

KLINTENSIV®

Alcool sanitar



200 ml, 500 ml, 3 litri (PET)



DESCRIERE

KLINTENSIV® alcool sanitar este un dezinfectant de uz extern, cu acțiune bactericidă și levuricidă, destinat utilizării în unitățile sanitare.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Acțiune bactericidă, levuricidă și virucidă certificată;
- Dezinfectare igienică rapidă a mâinilor (60 secunde);
- Activ împotriva bacteriilor, drojdiilor și virusurilor anvelopate;
- Toleranță bună a pielii;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Etanol, concentrație în unități metrice 70%.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Igienizare mâini.

Mod folosire: Dezinfectarea igienică a mâinilor prin frecare, se utilizează nediluat (ca atare), timp de 1 minut.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- În toate zonele spitalicești și în cabinetele/ centrele medicale;
- În căminele de bătrâni;
- Adecvat pentru îngrijirea la domiciliu.

Aviz emis de Comisia Națională pentru Produse Biocide:
Nr. 4127BIO/01-02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericidă	SR EN 1500	60 secunde
Levuricidă	SR EN 13624	7 minute
Virucidă (Coronavirus 229E)	SR EN 14476	60 secunde
Bactericidă	SR EN 13727	7 minute

NAPKLIN WIPES™

Șervețele umede
dezinfectante,
pe bază de alcool



pachet cu 15, 100 șervețele umede,
cutie cu capac cu 100 șervețele umede

DESCRIERE

NAPKLIN WIPES™ șervețele dezinfectante **ambalate individual**, pe bază de alcool, sunt folosite pentru dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor. Au acțiune rapidă, fiind ideale pentru utilizări frecvente în cabinetele medicale, între pacienți. Substanțele protectoare și hidratante pentru epidermă asigură echilibrul lipidic, prevenind apariția zonelor uscate și senzația de piele crăpată după utilizări multiple, într-un interval de timp relativ mic. Alcoolul etilic de calitate farmaceutică se evaporă rapid, astfel încât șervețelele nu lasă reziduuri sau frotiu, dar inactivează 99,99% din agenți patogeni, inclusiv E. coli, Pseudomonas și Enterococcus.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Efect dezinfectant rapid (timp de acțiune 30 secunde);
- Recomandat pentru utilizare zilnică și frecventă;
- Conține substanțe dezinfectante cu acțiune virucidă, levuricidă, fungicidă și bactericidă;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Etanol, concentrație în unități metrice 85%,
fiecare șervețel este îmbibat cu 4,5 ml soluție.



INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectare mâini.

Mod folosire: Se scoate șervețelul din ambalaj și se folosește o singură dată pentru ștergerea mâinilor până la evaporarea soluției. Un plic conține 1 șervețel cu dimensiunea de 16x19cm. Un șervețel conține minim 4,5 ml soluție. Se folosesc atâtea șervețele cât este nevoie în funcție de nivelul de dezinfecție dorit.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- În toate zonele spitalicești și în cabinetele/ centrele medicale;
- În căminele de bătrâni;
- Adecvat pentru îngrijirea la domiciliu;
- În industrie și laboratoare.

**Aviz emis de Comisia Națională
pentru Produse Biocide:
Nr. 5052BIO/01 /12.24**

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericidă	SR EN 1500, SR EN 13727	30 secunde
Bactericidă	SR EN 12791	3 x 60 secunde
Fungicidă, Levuricidă	SR EN 13624	60 secunde
Micobactericidă, Tuberculocidă	SR EN 14348	60 secunde
Virucidă	SR EN 14476	1 minut



SUPRAFETE ȘI PARDOSELI

KLINTENSIV®	Dezinfectant suprafețe, gata de utilizare	13
KLINTENSIV®	Șervețele umede dezinfectante pentru suprafețe	14
KLINTENSIV®	Detergent dezinfectant concentrat	15
SOLIKLOOR®	Dezinfectant clorigen tablete, cu spectru larg de acțiune	16
KLINOSEPT®	Dezinfectant rapid suprafețe, pe bază de alcool	17
KLINOMED™	Șervețele dezinfectante, pe bază de alcool	18
GLUTACIDE®	Dezinfectant concentrat pentru suprafețe și dispozitive	19
GLUTANOL™	Dezinfectant de nivel înalt, cu activator RTU	20
KLINTENSIV® 3-AMINO	Dezinfectant concentrat pentru suprafețe dure	21
KLINTENSIV® FIZZY TABLET	Tablete efervescente clorigene	22



KLINTENSIV®

Dezinfectant suprafețe, gata de utilizare



500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE

KLINTENSIV® dezinfectant suprafețe, gata de utilizare, elimină germenii și microbii de pe diverse tipuri de suprafețe intens utilizate, dar și de pe suprafețele delicate și opacizante, sensibile la atacul chimic al soluțiilor pe bază de alcool. Igienizează eficient scaunele de tratament, suprafețele din cabinetele medicale, din saloanele pentru nou-nascuți și alte unități medicale, spațiile farmaceutice.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Miros frumos, proaspăt și discret;
- Spectru larg de eficacitate împotriva bacteriilor, drojdiilor, fungilor și virusilor;
- Dezinfectant profesional, gata de utilizare;
- Nu conține fenoli și aldehide;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități metrice 0,34%;

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18

-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.



INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectare suprafețe.

Mod folosire: Se pulverizează direct pe zona care necesită curățare sau dezinfectare. Se distribuie uniform soluția pe întreaga suprafață și pe obiectele care necesită dezinfectare (se poate utiliza o bucată de material textil nețesut). Se lasă să acționeze minimum 5 minute, pentru dezinfectare de nivel mediu și scăzut; 60 de minute - pentru dezinfectare de nivel înalt. Nu necesită clătire.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- În instituții de spitalizare, săli de operații, secții de terapie intensivă și de boli infecțioase;
- În transport și tratament ambulatoriu sau de urgență;
- În laboratoare;
- În practici medicale pentru toate disciplinele;
- În îngrijirea la domiciliu a pacienților.

Aviz emis de Comisia Națională pentru Produse Biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericidă	SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 16615	5 minute
Fungicidă, Levuricidă	SR EN 13624, SR EN 13697	5-15 minute
Virucidă	SR EN 14476	5 minute
Micobactericidă, Tuberculocidă	SR EN 14348	60 minute
Sporicidă	SR EN 13704	60 minute

KLINTENSIV®

Șervețele umede dezinfectante pentru suprafețe



pachete cu 15, 30 și 80 șervețele umede



DESCRIERE

KLINTENSIV® șervețele umede dezinfectante pentru suprafețe sunt special create pentru spații delicate și opacizante, sensibile la atacul chimic al soluțiilor pe bază de alcool. Cu ajutorul acestor șervețele umede, puteți dezinfecta eficient suprafețele, echipamentele și instrumentarul din cabinete medicale, ambulanțe, unități UPU, spații private.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Șervețele cu proprietăți detergente și dezinfectante;
- Spectru larg de acțiune biocidă certificată;
- Dizolvă rapid reziduurile proteice;
- Nu conțin aldehide;
- Nu este necesară clătirea după utilizare;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități metrice 0,34%;

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchilimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectare suprafețe, echipamente.

Mod folosire: Se utilizează direct pe zona care necesită curățare sau dezinfectare. Se distribuie uniform soluția pe întreaga suprafață și pe obiectele care necesită dezinfectare prin ștergere. Se lasă să acționeze minimum 5 minute, pentru dezinfectare de nivel mediu și scăzut; 60 de minute - pentru dezinfectare de nivel înalt. Nu necesită clătire.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- În instituții de spitalizare, săli de operații, secții de terapie intensivă și de boli infecțioase;
- În transport și tratament ambulatoriu sau de urgență;
- În laboratoare;
- În practici medicale pentru toate disciplinele;
- În îngrijirea la domiciliu a pacienților.

Aviz emis de Comisia Națională
pentru Produse Biocide:
Nr. 2394BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bacterică	SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 16615, SR EN 14561	5 minute
Fungică, Levurică	SR EN 13624, SR EN 13697	5-15 minute
Virică	SR EN 14476	5 minute
Micobacterică, Tuberculică	SR EN 14348	60 minute
Sporică	SR EN 13704	60 minute

KLINTENSIV®

Detergent dezinfectant concentrat



1 litru, 5 litri



DESCRIERE

KLINTENSIV® detergent dezinfectant concentrat este soluția ideală pentru dezinfectarea și curățarea suprafețelor de toate tipurile. Este recomandat pentru dezinfectarea suprafețelor mari din cabinetele medicale, din unitățile sanitare și farmaceutice.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Detergent dezinfectant concentrat, profesional;
- Spectru larg de acțiune biocidă certificată;
- Nivel ridicat de eficiență;
- Performanță excelentă de curățare;
- Proprietăți dezodorizante;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Poli(hexametenbiguanidă), Polimer, concentrație în unități metrice 1,3%;

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchilimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 2,8%;

Clorură de didicildimetilamoniu, concentrație în unități metrice 18%.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectare suprafețe.

Mod folosire: Se prepară soluția 2% conform etichetă, apoi se folosește ca atare. Pentru dezinfectarea suprafețelor, ștergeți-le cu o lavetă înmuiată în soluție dezinfectantă sau pulverizați soluția peste suprafața contaminată, apoi ștergeți cu o lavetă umedă.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- În instituții de spitalizare, săli de operații, secții de terapie intensivă și de boli infecțioase;
- În transport și tratament ambulatoriu sau de urgență;
- În laboratoare;
- În practici medicale pentru toate disciplinele;
- În îngrijirea la domiciliu a pacienților.

**Aviz emis de Comisia Națională
pentru Produse Biocide:
Nr. 2267BIO/02/12.24**

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericidă	SR EN 13727, SR EN 13697	5 minute
Levuricidă	SR EN 13697, SR EN 13624	5 minute
Virucidă	SR EN 14476	5 minute
Fungicidă	SR EN 13697, SR EN 13624	60 minute

SOLIKLOOR®

Dezinfectant clorigen
tablete, cu spectru
larg de acțiune



recipient cu 50, 100, 300 tablete efervescente



DESCRIERE

SOLIKLOOR® este un **dezinfectant clorigen tablete** cu spectru larg de acțiune și utilizări multiple. Este utilizat pentru suprafețele și echipamentele din instituțiile medicale și din alte medii, care necesită dezinfectare.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Dezinfectant și antiseptic clorigen;
- Spectru larg de acțiune biocidă certificată;
- Eficiență sporită împotriva germenilor patogeni;
- Puternic dezodorizant;
- Se depozitează ușor, datorită formei de tip tablete;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Dicloroizocianurat de sodiu dihidrat, concentrație 90% (1 tabletă de 3,3 g eliberează 1,5 g clor activ).

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Se utilizează pentru dezinfectarea suprafețelor (pardoseli, scări, uși, blocuri alimentare, vestiare), a obiectelor și echipamentelor sanitare, instrumentarului medical și chirurgical, precum și a recipientelor, veselei, tacâmurilor și ustensilelor din zonele de preparare și de servire a hranei.

Mod folosire:

- Dezinfecția suprafețelor (pereți, pavimente, băi, grupuri sanitare, etc) - 1 tabletă/ 10 litri de apă.
- Dezinfecția blocului alimentar, căi de acces, frigider, ustensile, utilaje - 1 tabletă/ 10 litri de apă.
- Dezinfecția bureților de spălat vase, prosoape albe, vase pentru păstrarea alimentelor - 1 tabletă/ 25 litri de apă.

Se aplică numai pe suprafețe confecționate din material compatibil cu soluția de lucru (plastic, sticlă, ceramică, oțel inoxidabil, cauciuc). Înainte de aplicare, se curăță resturile organice și de murdarie (ex. fluide, sânge, puroi etc). Soluția de lucru se aplică prin ștergere, pulverizare sau imersie, după caz.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- În camere de tratament și secții ambulatorii;
- În ambulanțe;
- În laboratoare;
- În departamentele de servicii interne;
- În bucătăriile de spital și cantine.

**Aviz emis de Comisia Națională
pentru Produse Biocide:
Nr. 4719BIO/02/12.24
și Nr. 4736BIO/04/12.24**

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Virucid	SR EN 14476	5 minute
Bactericidă	SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 14561	15-30 minute
Fungicidă, Levuricidă	SR EN 13624, SR EN 14562	30 minute
Micobactericidă, Tuberculocidă	SR EN 14438	30 minute
Sporicidă	SR EN 13704	60 minute

KLINOSEPT®

Dezinfectant rapid suprafețe, pe bază de alcool



500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE

KLINOSEPT® dezinfectant pentru suprafețe, pe bază de alcool este ideal pentru dezinfectare rapidă. Soluția este gata de utilizare, fiind recomandată pentru suprafețe rezistente la alcool.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Elimină rapid germenii (30 de secunde);
- Gata de folosire;
- Activitate biocidă extinsă, în cel mai scurt timp posibil;
- Ușor de utilizat;
- Se usucă rapid, fără să lase frotiuri;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Etanol, concentrație în unități metrice 85%.



INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectarea diferitelor suprafețe.

Mod folosire: Se aplică nediluat pe suprafețe, se lasă să acționeze, apoi se șterge. Eliminați toate murdăriile vizibile înainte de dezinfectare.

Udați complet suprafețele și păstrați-le umede pe toată perioada de expunere sugerată de producător.

Se pulverizează pe suprafața de la o distanță de aproximativ 30 cm. Rata maximă de aplicare: 50 ml/mp. Produsul poate fi folosit fără mănuși. Se utilizează numai pe materiale compatibile cu alcoolul. Nu tratați suprafețele sensibile la alcool, de exemplu sticlă acrilică.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

Dezinfectarea rapidă a zonelor și a diverselor suprafețe de infecție și/sau în cazul în care sunt necesari timpi scurți din unitățile sanitare:

- Suprafețele din apropierea pacientului;
- Unități de tratament pentru pacienți;
- Canapele de examinare;
- Mese și suprafețe de lucru;
- Suprafețele echipamentelor medicale.

Aviz emis de Comisia Națională pentru Produse Biocide:
Nr. 4818BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Temp acțiune
Bactericidă	SR EN 13727	30 secunde
Fungicidă, Levuricidă	SR EN 13624, SR EN 13697	60 secunde
Micobactericidă, Tuberculocidă	SR EN 14348	60 secunde
Virucidă	SR EN 14476	1-2 minute

KLINOMED™

Șervețele dezinfectante, pe bază de alcool



pachet cu 80, 100 șervețele,
cutie cu capac cu 100 șervețele umede

DESCRIERE

KLINOMED™ șervețele dezinfectante, pe bază de alcool, sunt impregnate cu o soluție alcoolică, fiind gata de utilizare. Sunt recomandate pentru dezinfectarea rapidă a suprafețelor din toate zonele spitalicești, și pentru toate tipurile de suprafețe cu risc crescut de infecție și/ sau în cazul în care sunt necesari timpi scurți de contact.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Elimină rapid germenii (30 de secunde);
- Eficient inclusiv pentru curățarea suprafețelor de lucru;
- Dezinfectare facilă, șervețele impregnate, gata de utilizare;
- Activitate biocidă extinsă în cel mai scurt timp posibil;
- Uscare rapidă;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Etanol, concentrație în unități metrice 85%.



INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectarea diferitelor suprafețe rezistente la alcool.

Mod folosire: Ștergeți bine suprafața cu șervețelul impregnat și lăsați să acționeze. Umeziți complet suprafețele și păstrați-le umede pe tot timpul de expunere indicat. Îndepărtați toată murdăria vizibilă înainte de dezinfectare. Când folosiți șervețelul umed dezinfectant, respectați normele de igienă. Asigurați-vă că după utilizare închideți pachetul și îl acoperiți/ sigilați. Nu tratați suprafețele sensibile la alcool, de exemplu sticla acrilică.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- Suprafețe din apropierea pacientului;
- Unități de tratament pentru pacienți;
- Canapele de examinare;
- Mese de operație și suprafețe de lucru din apropiere;
- Suprafețele echipamentelor medicale.

**Aviz emis de Comisia Națională
pentru Produse Biocide:
Nr. 4866BIO/02/12.24**

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bacterică	SR EN 13727	30 secunde
Fungică, Levurică	SR EN 13624, SR EN 13697	60 secunde
Micobacterică, Tuberculică	SR EN 14348	60 secunde
Virică	SR EN 14476	1-2 minute

GLUTACIDE®

Dezinfectant
concentrat
pentru suprafețe



1 litru, 5 litri

DESCRIERE

GLUTACIDE® dezinfectant concentrat este utilizat pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor. Este recomandat pentru utilizare frecventă, în domeniul medical.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Acțiune biocidă certificată;
- Dizolvă rapid reziduurile proteice;
- Performanță bună de curățare;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Glutaral (Glutaraldehidă), concentrație în unități metrice 10%;

Compuși de amoniu cuaternar, benzyl-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 15%.



INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectarea diferitelor suprafețe.

Mod folosire: Se diluează la 1%, adică 10 ml produs, peste care se adaugă apă până la 1 litru, astfel încât să se obțină soluția de lucru. Pentru dezinfectarea suprafețelor, ștergeți respectiva suprafață cu o lavetă înmuiată în soluție sau pulverizați soluția dezinfectantă peste suprafața contaminată, apoi ștergeți cu o lavetă umedă.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- Dezinfectarea și curățarea suprafețelor;
- În toate zonele spitalului (de exemplu, secții, UCI);
- În special pentru zonele sensibile la miros;
- Pe materiale sensibile (de exemplu, sticlă acrilică).

**Aviz emis de Comisia Națională
pentru Produse Biocide:
Nr. 4824BIO/02/12.24**

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bacterică	SR EN 13727	5 minute
Levurică	SR EN 13624, SR EN 13697	5 minute

GLUTANOL™

Dezinfectant
de nivel înalt,
cu activator RTU



1 litru, 5 litri



DESCRIERE

GLUTANOL™ dezinfectant de nivel înalt, cu activator, este o soluție hidroalcoolică de glutaraldehidă, gata de utilizare, non-corozivă, pentru dezinfectare de nivel înalt și sterilizare chimică. Adaosul de alcool îmbunătățește activitatea biocidă a glutaraldehidei (în special în cazul micobacteriilor tuberculoase). Are acțiune rapidă (5 minute la temperatura camerei).

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Dezinfectant de nivel înalt RTU;
- Acțiune biocidă certificată;
- Recomandat pentru echipamente și instrumente imersibile și sensibile la căldură;
- Poate fi reutilizat până la 14 zile (atunci când este monitorizat conform instrucțiunilor de pe etichetă);
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Glutaral (Glutaraldehidă), concentrație în unități metrice 2,4%;

Etanol, concentrație în unități metrice 15%.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectare suprafețe.

Mod folosire:

Se activează soluția. Dezinfectare suprafețe.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- Endoscopie;
- Centre de chirurgie;
- Alte zone în care este necesară dezinfectarea la nivel înalt;
- Suprafețe semi-critice și critice în mediul medical;
- Echipamente de anestezie, echipamente de terapie respiratorie, obiecte din cauciuc și plastic.

**Aviz emis de Comisia Națională
pentru Produse Biocide:
Nr. 5095BIO/02/12.24**

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericidă	SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 16615	5 minute
Fungicidă, Levuricidă	SR EN 13624	5 minute
Virucidă	SR EN 14476, SR EN 13697	5 minute
Micobactericidă, Tuberculocidă	SR EN 14348	5 minute
Sporicidă	SR EN 17126	60 minute

KLINTENSIV® 3-AMINO

Dezinfectant concentrat pentru suprafețe dure



1 litru, 5 litri



DESCRIERE

KLINTENSIV® 3-AMINO dezinfectant concentrat este o soluție cu eficiență ridicată, folosită pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor dure, precum pereți, podele, toalete, mânerul ușilor etc. Este recomandat ca procedură de dezinfectare de rutină în unitățile de terapie intensivă, coridoarele și zonele din apropierea pacienților.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Compatibil cu majoritatea materialelor, precum oțel inoxidabil, aluminiu, sticlă, ceramică, plastic dur, linoleum, ebonit etc;
- Acțiune biocidă certificată;
- Nu conține fenoli, aldehide, clor sau EDTA;
- Produs economic, cu spectru biocid larg;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină,
concentrație în unități metrice 15,3%;

N,N-didecil-N-metil -polioxietil propionat de amoniu,
concentrație în unități metrice 14%.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectare suprafețe.

Mod folosire: Se prepară soluția 0,25%, adică 25 ml produs concentrat se diluează în 9,975 litri de apă. Se amestecă bine, pentru o bună omogenizare. Se aplică prin pulverizare sau prin ștergere cu laveta sau mopul. Se distribuie uniform, apoi se lasă să acționeze minim 5 minute, iar în tot acest timp suprafața trebuie să rămână umedă.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- Dezinfectare de rutină în unitățile de terapie intensivă, coridoarele și zonele din apropierea pacienților;
- Dezinfectarea și curățarea pardoselilor, pereților, inclusiv încăperi nou născuți.

**Aviz emis de Comisia Națională
pentru Produse Biocide:
Nr. 5240BIO/02/12.24**

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Temp acțiune
Bacterică	SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 16615	5 minute
Levurică	SR EN 13624, SR EN 16615	5 minute
Virucidă	SR EN 14476, SR EN 13697	5 minute
Tuberculocică	SR EN 14348	15 minute
Micobacterică, Tuberculocică	SR EN 14348	30 minute
Fungică	SR EN 13624, SR EN 13697	60 minute

KLINTENSIV® FIZZY TABLET

Tablete efervescente
clorigene



recipient cu 40, 75, 150, 280 tablete efervescente

DESCRIERE

KLINTENSIV® Fizzy Tablet, tablete efervescente clorigene sunt destinate dezinfectării suprafețelor care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale. Tabletele se utilizează în unități sanitare, laboratoare medicale, instituții publice sau în domeniul casnic. O tabletă eliberează 1,5g clor activ și conține minim 3,3g grame.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Produsul se prezintă sub formă de tablete de culoare albă;
- Produsul este stabil din punct de vedere chimic, în condițiile specificate de depozitare, manipulare și utilizare;
- Efect biocid complet la 5 minute conform SR EN 14885 și ghid BPR;
- Activ și pe *Legionella*;
- Ușor de folosit.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

dicloroizocianurat de sodiu dihidratat, concentrație în unități metrice 80%.



INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectare suprafețe.

Mod folosire: Tabletele clorigene se dizolvă în cantitatea de apă necesară pentru activitatea biocidă dorită (vezi pe ambalaj). Ca măsură de prevenire, se recomandă utilizarea de echipamente de protecție individuală care trebuie să prezinte inscripția "CE": mască autofiltrantă pentru gaze și vapori, mănuși de protecție împotriva riscurilor minore, ochelari de protecție splash sau vizieră și îmbrăcăminte de serviciu.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- Dezinfectarea suprafețelor care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale;
- Pentru unități sanitare, laboratoare medicale
- Instituții publice: școli, azile de bătrâni, hoteluri, săli de sport, săli de conferință, aeroporturi, gări, hale industriale
- Domeniul casnic.

**Avizat de Ministerul Sănătății sub
Nr. 5461BIO/02/12.24**

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericidă	SR EN 13727, SR EN 1276, SR EN 13697	5 minute
Fungicidă	SR EN 13697, SR EN 13624, SR EN 1650	5 minute
Virucidă	SR EN 14476	5 minute
Sporicidă, micobactericidă	SR EN 13704, SR EN 14348	5 minute
<i>Legionella</i>	SR EN 13623	60 minute



ECHIPAMENTE ȘI INSTRUMENTAR

STERISOL™	Dezinfectant de nivel înalt RTU	25
SPORICYDE®	Dezinfectant concentrat de nivel înalt	26
KLINTENSIV®	Dezinfectant concentrat pentru instrumentar	27
GLUTACARE™	Dezinfectant de nivel înalt, pentru instrumentar	28
KLINTENSIV®DIAMINE	Dezinfectant concentrat	29
KLINOZYME™	Detergent enzimatic pentru instrumentar	30
KLINTENSIV®QUAT WIPES	Șervețele umede dezinfectante pentru suprafețe	31
KLINTENSIV® DEZICON	Dezinfectant concentrat de nivel înalt	32



STERISOL™

Dezinfectant de nivel înalt RTU



500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE

STERISOL™ dezinfectant de nivel înalt RTU este un produs de înaltă calitate, destinat întrebuințării de lungă durată în mediile din domeniul medical și profesional. Curăță și dezinfectează cu succes obiectele, instrumentarul și aerul din încăperi. Se poate folosi pentru dezinfectarea suprafețelor critice și semi-critice și a instrumentarului medical invaziv și non-invaziv, a echipamentelor, recipientelor și ustensilelor din saloanele de cosmetică, zonele industriale și farmaceutice, dar și a suprafețelor de acasă. Este potrivit pentru suprafețe diverse, precum cele intens utilizate sau circulate (lemn, pardoseli, faianță, PVC, inox, sticlă, plastic, mobilier, ceramică, scaune, mobile, canapele consultații, grupuri sanitare, saloane nou-născuți).

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Dezinfectant de nivel înalt RTU;
- Acțiune biocidă certificată;
- Nu conține aldehyde, fenoli sau alcool;
- Dizolvă rapid reziduurile proteice;
- Compatibil cu orice tip de material;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități metrice 0,34%;

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericidă	SR EN 1276, SR EN 13697, SR EN 13727	5 minute
Bactericidă	SR EN 14561	15 minute
Levuricidă	SR EN 1650, SR EN 13624, SR EN 13697	5 minute
Levuricidă	SR EN 14562	10 minute
Fungicidă	SR EN 13624	5 minute
Fungicidă	SR EN 13697	15 minute
Fungicidă	SR EN 14562	60 minute
Micobactericidă, Tuberculocidă	SR EN 14348, SR EN 14563	60 minute
Sporicidă	SR EN 13704	60 minute
Virucidă	SR EN 14476	5 minute



Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18 -alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectare suprafețe, microaerofloră, instrumentar.

Mod folosire:

Suprafețe: Se pulverizează direct pe zona care necesită curățare sau dezinfectare și se distribuie uniform soluția activă peste întreaga suprafață și peste obiectele care trebuie dezinfectate. Se lasă să acționeze minimum 5 minute. Nu necesită clătire.

Instrumentar: Se curăță instrumentarul de murdărie grosieră, dacă este cazul, apoi se imersează în soluție. Se lasă să acționeze conform timpilor de acțiune recomandați în Fișa Tehnică, apoi se clătește cu apă sterilă.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- Cabinete medicale și spitale;
- Producători industria farmaceutică;
- Instituții publice;
- Utilizatori casnici.

Aviz emis de Comisia Națională pentru Produse Biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24

SPORYCIDE®

Dezinfectant
concentrat
de nivel înalt



1 litru, 5 litri



DESCRIERE

SPORYCIDE® dezinfectant concentrat de nivel înalt, pe bază de aldehydă, este utilizat pentru instrumente sensibile la căldură și rezistente la căldură. Este recomandat pentru dezinfectarea manuală a instrumentelor sensibile la căldură (inclusiv endoscoape flexibile) în băile de imersie și pentru procedurile de circulație la rece.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Detergent dezinfectant concentrat, profesional și industrial;
- Spectru larg de acțiune biocidă certificată;
- Nivel ridicat de eficiență;
- Putere de curățare puternică;
- Grad ridicat de compatibilitate cu majoritatea materialelor;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Glutaral (glutaraldehidă), concentrație în unități metrice 10%;
Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu IADBAC/BKC (C12-C16), concentrație în unități metrice 15%;
Acid D-gluconic, compus cu N, N " - bis (4-clorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-Tetraazatetradecanediamidină 2:1 (CHDG), concentrație în unități metrice 0,35%;
Etanol, concentrație în unități metrice 0,5%.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectarea de nivel înalt a suprafețelor și a instrumentarului din diverse medii: săli de operație, săli de nașteri, cabinete de consultații ginecologice, săli de primire urgențe (UPU).

Mod folosire: Se diluează la 1%, adică 10 ml produs, peste care se adaugă apă până la 1 litru, astfel încât să se obțină soluția de lucru.

Pentru dezinfectarea suprafețelor, ștergeți respectiva suprafață cu o lavetă înmuiată în soluție sau pulverizați soluția dezinfectantă peste suprafața contaminată, apoi ștergeți cu o lavetă umedă.

Pentru dezinfectarea instrumentarului medical, se imersează instrumentarul în soluție gata de lucru. După ce se lasă să acționeze, conform indicațiilor din Fișa Tehnică, se clătește cu apă sterilă.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- Cabinete medicale și spitale;
- Dezinfectarea și curățarea instrumentarului și a altor suprafețe;
- În toate zonele spitalului (de exemplu, secții, UCI);
- Pe materiale sensibile (de exemplu, sticlă acrilică).

**Aviz emis de Comisia Națională
pentru Produse Biocide:
Nr. 4219BIO/02/12.24**

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericidă	SR EN 13727, SR EN 13697	5 minute
Levuricidă	SR EN 13624, SR EN 13697	5 minute
Fungicidă, Levuricidă, Bactericidă	SR EN 1650, SR EN 14561, SR EN 14562, SR EN 1276	30 minute
Sporicidă	SR EN 13704	60 minute
Virucidă	SR EN 14476	60 minute

KLINTENSIV®

Detergent dezinfectant concentrat pentru instrumentar



1 litru, 5 litri



DESCRIERE

KLINTENSIV® Detergent dezinfectant concentrat pentru instrumentar este ideal pentru dezinfectarea și curățarea instrumentarului medical. Produsul este recomandat pentru dezinfectarea ustensilelor de laborator, echipamentelor, recipientelor, ustensilelor din cabinetele medicale și din unitățile sanitare, cât și pentru curățarea, dezinfectarea și dezodorizarea zilnică a tuturor instrumentelor folosite în cabinetele stomatologice.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Detergent dezinfectant concentrat, profesional;
- Spectru larg de acțiune biocidă certificată;
- Nivel ridicat de eficiență;
- Fără aldehide, cu o excelentă putere de curățare;
- Grad ridicat de compatibilitate cu diverse materiale;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Poli(hexametenbiguanidă), Polimer, concentrație în unități metrice 1,3 %;

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18- alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 2,8%;

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități metrice 18%.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectare instrumentar și echipamente.

Mod folosire: Se diluează la 2%, adică 20 ml produs, peste care se adaugă apă până la 1 litru, pentru a se obține soluția de lucru.

Instrumentar: Pentru dezinfectarea instrumentarului medical, se imersează în soluție și, după trecerea timpului recomandat de acțiune, se clătește cu apă sterilă.

Suprafețe: Pentru dezinfectarea suprafețelor, ștergeți suprafața contaminată cu o lavetă înmuiată în soluție dezinfectantă sau pulverizați soluția dezinfectantă cu ajutorul unei pompe cu presiune peste suprafața contaminată și apoi ștergeți cu o lavetă umedă.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- Cabinete medicale și spitale;
- Dezinfectarea și curățarea instrumentarului și a altor suprafețe;
- În toate zonele spitalului (de exemplu, secții, UCI).

Aviz emis de Comisia Națională pentru Produse Biocide:
Nr. 2267BIO/02/12.24

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericidă	SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 14561	5 minute
Levuricidă	SR EN 13697, SR EN 13624, SR EN 14562	5 minute
Virucidă	SR EN 14476	5 minute
Fungicidă	SR EN 13697	60 minute

GLUTACARE™

Dezinfectant
de nivel înalt
pentru instrumentar



1 litru, 5 litri

DESCRIERE

GLUTACARE™ dezinfectant de nivel înalt este o soluție hidroalcoolică de glutaraldehidă, cu activator, gata de utilizare, pentru dezinfectare de nivel înalt și sterilizare chimică. Adaosul de alcool îmbunătățește activitatea micobacterică a glutaraldehidei (în special în cazul micobacteriilor tuberculoase). Soluția are acțiune rapidă (5 minute la temperatura camerei) asupra bacteriilor vegetative, fungilor, micobacteriilor, virusilor. Se recomandă pentru sterilizarea chimică a unei varietăți de echipamente critice/ semicritice: inclusiv echipamente de anestezie, de terapie respiratorie, echipamente sau instrumente metalice, obiecte din cauciuc, din plastic sau sticlă, termometre, stetoscoape, endoscoape. Soluția nu este corozivă, fiind ideală pentru utilizarea pe echipamente și instrumente medicale sensibile la căldură. Nu este necesară diluarea. Formula nu conține agenți tensioactivi.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Dezinfectant de nivel înalt RTU;
- Acțiune biocidă certificată;
- Recomandat pentru echipamente și instrumente; imersibile și sensibile la căldură;
- Poate fi reutilizat până la 14 zile (atunci când este; monitorizat conform instrucțiunilor de pe etichetă);
- Testat conform normelor UE în vigoare.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată		Standard testare	Timp acțiune
Bacterică	SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 16615, SR EN 14561, SR EN 13697		5 minute
Bacterică		SR EN 1276	5 minute
Fungică, Levurică	SR EN 13624, SR EN 14562, SR EN 13697, SR EN 1650		5 minute
Virucidă		SR EN 14476	5 minute
Fungică		SR EN 1657	30 minute
Micobacterică, Tuberculică		SR EN 14348, SR EN 14563	5-60 minute
Sporică		SR EN 17126	60 minute



SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Glutaral (glutaraldehidă), concentrație în unități metrice 2,4%; Etanol, concentrație în unități metrice 15%.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectarea suprafețelor, echipamentelor și instrumentarului medical.

Mod folosire: Se activează soluția conform etichetei.

Instrumentar: Se curăță instrumentarul de murdărie grosieră, dacă este cazul, apoi se imersează în soluție. Se lasă să acționeze, conform timpilor de acțiune recomandați în Fișa Tehnică, apoi se spală cu apă sterilă. **Suprafețe:** Se pulverizează direct pe zona care necesită curățare sau dezinfectare și se distribuie uniform soluția activă peste întreaga suprafață și peste obiectele care trebuie dezinfectate. Se lasă să acționeze minimum 5 minute.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- Endoscopie;
- Centre de chirurgie;
- Alte zone în care este necesară dezinfectarea de nivel înalt;
- Instrumentar invaziv și non-invaziv în mediul medical;
- Echipamente de anestezie, echipamente de terapie; respiratorie, obiecte din cauciuc și plastic;
- Instrumente din oțel inoxidabil.

Aviz emis de Comisia Națională
pentru Produse Biocide:
Nr. 5095BIO/02/12.24

KLINTENSIV® DIAMINE

Dezinfectant concentrat



1 litru, 5 litri



DESCRIERE

KLINTENSIV® DIAMINE este o soluție inovatoare pentru dezinfectarea instrumentelor, extrem de eficientă, care se caracterizează în special prin concentrații foarte mici de aplicare, cu un timp de acțiune scurt. Soluția activă are o putere de curățare excelentă chiar și pentru încărcături ridicate de proteine. Produsul nu conține fenoli și aldehide, prin urmare este foarte ușor de utilizat. Utilizarea inhibitorilor de coroziune oferă un factor de protecție pentru instrumente.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Compatibil cu majoritatea materialelor, precum oțel inoxidabil, aluminiu, sticlă, ceramică, plastic dur, linoleum, ebonit etc;
- Acțiune biocidă certificată;
- Nu conține fenoli, aldehide, clor sau EDTA;
- Spectru larg de proprietăți biocide și putere de curățare foarte bună;
- Produs economic, fiind activ la concentrații mici ale soluției de lucru;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine,
concentrație în unități metrice 15,3%;

N,N-didecil-N-metil -polioxietil propionat de amoniu,
concentrație în unități metrice, 14%.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericidă	SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 16615, SR EN 14561	5 minute
Levuricidă	SR EN 13624, SR EN 14562, SR EN 16615, SR EN 13697, SR EN 1650	5 minute
Virucidă	SR EN 14476	5 minute
Tuberculocidă	SR EN 14348	15 minute
Micobactericidă, Tuberculocidă	SR EN 14348, SR EN 14563	5 - 60 minute
Fungicidă	SR EN 13624, SR EN 14562, SR EN 13697, SR EN 1650	60 minute

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectare suprafețe, echipamente și instrumentar.

Mod folosire: Se prepară soluția 0,25%, adică 25 ml produs concentrat se diluează în 9,975 litri de apă. Se amestecă bine, pentru o bună omogenizare. Se curăță instrumentarul de murdărie grosieră, dacă este cazul, apoi se imersează în soluție. Se lasă să acționeze, conform timpilor de acțiune recomandați în Fișa Tehnică.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- Dezinfectare de rutină a instrumentarului medical, în unitățile de terapie intensivă, coridoarele și zonele din apropierea pacienților;
- Dezinfectarea și curățarea pardoselilor, pereților, inclusiv încăperi nou născuți;
- Suprafețe semi-critice și critice în mediul medical.

**Aviz emis de Comisia Națională
pentru Produse Biocide:
Nr. 5240BIO/02/12.24**

KLINOZYME™

Detergent enzimatic pentru instrumentar



1 litru, 5 litri

DESCRIERE

KLINOZYME™ detergent enzimatic concentrat este utilizat pentru curățarea instrumentarului medical; produsul oferă o mare performanță în îndepărtarea reziduurilor organice fără procedee mecanice agresive ce pot deteriora instrumentarul medical. Efectul produsului este datorat unui complex de surfactanți și amestec trienzimatic. KLINOZYME™ elimină eficient reziduurile de mucus, sânge și proteine de pe instrumentarul destinat domeniului medical prin intervenții invazive, respectiv părți demontabile ale unor echipamente destinate diagnosticării și tratării chirurgicale minim invazive (endoscoape, instrumentar al laparoscopului/ brațelor robotizate pentru intervențiile chirurgicale). Soluția gata de lucru prezintă un pH neutru ce protejează suprafețele curățate; este ideal pentru utilizarea în baie cu ultrasunete.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Performanță foarte mare de curățare;
- Îndepărtează resturile de sânge și proteine din instrumente;
- Ideal pentru utilizare în baie cu ultrasunete;
- Ideal pentru îndepărtarea și prevenirea biofilmelor periculoase;
- Nivel PH neutru;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

5 – 15 % surfactanți neionici, enzime.



INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Agent de curățare a instrumentarului medical.

Mod folosire: Se diluează cu apă rece pentru a produce concentrația dorită. În funcție de gradul de eficacitate dorită, se diluează între 1,0%-5,0% (10-50 ml/l); Exemplu de aplicare: 1 litru de 2% de soluție de lucru corespunde la 980 ml de apă și 20 ml de soluție KLINOZYME™. Se amplasează instrumentele pentru reprelucrare în soluție KLINOZYME™ imediat după utilizare. Se acoperă/îmersează complet în soluție, apoi se clătesc cu apă potabilă, preferabil distilată, urmând a fi sterilizate.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- Endoscopie;
- Reprocesarea instrumentelor chirurgicale;
- Echipamente de anestezie, echipamente de terapie respiratorie, obiecte din cauciuc și plastic;
- Instrumentar utilizat pentru intervenții chirurgicale tip laparoscopic/ robotizat.

KLINOZYME™ este utilizat ca agent de curățare prin procedee nonagresive. Mecanismul de acțiune al produsului presupune dezintegrarea resturilor organice. După utilizare, instrumentele trebuie reprocessate și dezinfectate, în conformitate cu cerințele legale, apoi sterilizate. GLUTANOL RTU și KLINTENSIV™ DIAMINE sunt recomandate pentru dezinfectarea acesora. Produsele sunt compatibile între ele și pot fi utilizate unul după altul fără probleme.

KLINTENSIV® QUAT WIPES

Șervețele umede
dezinfectante
pentru instrumentar



pachete cu 80 șervețele umede,
cutie cu capac cu 100 șervețele umede

DESCRIERE

KLINTENSIV® Șervețele umede dezinfectante pentru instrumentar sunt special create pentru spații delicate și opacizante, sensibile la atacul chimic al soluțiilor pe bază de alcool. Cu ajutorul acestor șervețele umede, puteți dezinfecta eficient suprafețele, echipamentele și instrumentarul din cabinete medicale, ambulanțe, unități UPU, spații private.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Șervețele cu proprietăți dezinfectante;
- Spectru larg de acțiune biocidă certificată, dezinfecție de nivel înalt;
- Dizolvă rapid reziduurile proteice;
- Nu conține aldehyde;
- Nu este necesară clătirea după utilizare;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități metrice 0,34%;

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alcildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.



INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfecare suprafețe, echipamente, instrumentar.

Mod folosire: Se utilizează direct pe zona care necesită curățare sau dezinfecare. Se distribuie uniform soluția pe întreaga suprafață și pe obiectele care necesită dezinfecare. Se lasă să acționeze minimum 5 minute, pentru dezinfecare de nivel mediu și scăzut; 60 de minute - pentru dezinfecare de nivel înalt. Nu necesită clătire.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- În instituții de spitalizare, săli de operații, secții de terapie intensivă și de boli infecțioase;
- În transport și tratament ambulatoriu sau de urgență;
- În laboratoare;
- În practici medicale pentru toate disciplinele;
- În îngrijirea la domiciliu a pacienților.

**Aviz emis de Comisia Națională
pentru Produse Biocide:
Nr. 2394BIO/02/12.24**

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericidă	SR EN 1276, SR EN 13697, SR EN 13727	5 minute
Bactericidă	SR EN 14561	15 minute
Levuricidă	SR EN 1650, SR EN 13624, SR EN 13697	5 minute
Levuricidă	SR EN 14562	10 minute
Fungicidă	SR EN 13624	5 minute
Fungicidă	SR EN 13697	15 minute
Fungicidă	SR EN 14562	60 minute
Micobactericidă, Tuberculocidă	SR EN 14348	60 minute
Sporicidă	SR EN 13704	60 minute
Virucidă	SR EN 14476	5 minute

KLINTENSIV® DEZICON

Dezinfectant concentrat de nivel înalt



1 litru, 5 litri

DESCRIERE

KLINTENSIV® DEZICON este un dezinfectant concentrat utilizat pentru dezinfectia suprafețelor, pre-dezinfectarea și curățarea instrumentarului medical și chirurgical și dezinfectarea suprafețelor prin nebulizare sau prin pulverizare electrostatică.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Dezinfectant pentru suprafețe gata de utilizare, cu excepția utilizării pe suprafețe care iau contact cu alimentele;
- Produsul, sub formă de soluție gata de lucru este compatibil cu multiple suprafețe;
- Compatibil cu suprafețe metalice neacoperite (aluminiu, cupru, zinc, bronz, argint, aur, inox medical/ alimentar/ 316L/ 316L);
- Compatibil cu suprafețe metalice acoperite (vopsea, galvanizate, email, rășini), plastice de diferite tipuri (PP, PE, HDPE ș.a.);
- Compatibil cu suprafețe: cauciuc, silicon, teflon, linoleum, lemn, compozite minerale (gresie, faianță, marmură, beton ș.a.);
- Nu este necesară clătire.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități metrice 17%; Compuși de amoniu cuaternar, cloruri de benzil C12-C18-alcildimetil, concentrație în unități metrice 4,5%; surfactanți, agent de chelatare, parfum, apă.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bacterică	SR EN 1276, SR EN 13727, SR EN 16615, SR EN 13697; SR EN 14561	5-15 minute
Fungică, Levurică	SR EN 13697, SR EN 14562, SR EN 13624, SR EN 1650	5-60 minute
Sporică, micobacterică/ tuberculocică	SR EN 13704, SR EN 14348	60 minute
Virucidă	SR EN 14476	5 / 30 minute



INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectant pentru suprafețe, instrumentar, micro-aerofloră.

Mod folosire: Produsul se prepară în soluție 2% și se aplică folosind un pulverizator manual, lavetă din material sintetic sau prin imersie în recipient cu lichid. Nu necesită clătire. Soluția gata de utilizare se poate folosi pe suprafețe curate/ murdare, iar acesta prezintă acțiune rapidă.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- dezinfectarea suprafețelor și a obiectelor de inventar din unități sanitare cum sunt: mobilierul de spital, laboratoare de analize, brancarde, tărgi, cărucioare, canapele de consultații și tratament, mese de operații, obiecte sanitare, clanțe de uși, telefoane;
- dezinfectarea suprafețelor și a aparaturii medicale din cabinete stomatologice și cabinete medicale individuale, săli de tratamente, săli de chirurgie;
- dezinfectarea suprafețelor, instrumentarului chirurgical neinvaziv (stetoscoape, termometre, etc.);
- dezinfectarea suprafețelor dure neporoase din sectorul public (birouri, instituții de învățământ, săli de sport, săli de conferințe, spații comerciale, gări, autogări);
- dezinfectarea și igienizarea suprafețelor și obiectelor de inventar din saloane de cosmetică și coafură;
- dezinfectarea suprafețelor prin nebulizare sau prin pulverizare electrostatică (no-touch disinfecting technologies).

**Avizat de Ministerul Sănătății sub
Nr. 5630BIO/02/12.24**



MICROAEROFLOARĂ

DESOGEN® AERO
AMBIOCIDE®

Dezinfectant microaerofloră
Dezinfectant microaerofloră RTU

35
36



DESOGEN® AERO

Dezinfectant microaerofloră



1 litru, 5 litri



DESCRIERE

DESOGEN® AERO este recomandat pentru dezinfectarea aerului din încăperi din diverse medii profesionale, fiind utilizat chiar și în industria alimentară. Produsul poate fi utilizat pentru dezinfectarea diverselor suprafețe din aria medicală (pereți, pardoseli, mobilier de spital, mese de operații, paturi, cărucioare, containere, ambulanțe, obiecte sanitare), pentru confecții de cauciuc și materiale textile, instrumentare medicală, sticlărie de laborator.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Dezinfectant concentrat de nivel înalt;
- Soluție cu proprietăți dezinfectante;
- Nu conține aldehyde;
- Are acțiune biocidă certificată;
- 99,9% biodegradabil;
- Nu este clasificat drept coroziv;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Peroxid de hidrogen, concentrație în unități metrice 5%.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectarea suprafețelor dure prin pulverizare și nebulizare. Dezinfectarea suprafețelor dure prin ștergere cu laveta, cu mopul sau prin spălare. Dezinfectarea echipamentelor și a instrumentelor prin imersare/ scufundare/ înmuiere.

Mod folosire: **DESOGEN® AERO** se utilizează gata de lucru pentru dezinfectarea microaeroflorei, suprafețelor de orice tip, instalațiilor din domeniu medical și a instrumentarului medical. Se nebulizează 10 ml produs/ m³ volum încăpere.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- Cabinete medicale și spitale;
- Instituții publice;
- Producători din industria alimentară;
- Utilizatori industriali.

Autorizație
Nr. 159/ 09.2020

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timpi acțiune
Bactericidă	SR EN 13727, SR EN 13623	15 minute
Fungicidă, Levuricidă	SR EN 13624	15 minute
Virucidă	SR EN 14476	15 minute
Micobactericidă, Tuberculocidă	SR EN 14348	60 minute
Sporicidă	SR EN 14347	60 minute

AMBIOCIDE®

Dezinfectant microaerofloră RTU



1 litru, 5 litri



DESCRIERE

AMBIOCIDE® dezinfectant microaerofloră RTU este utilizat pentru dezinfectarea aerului din încăperi. Pentru igienizarea adecvată, se introduce în nebulizator o cantitate de produs calculată în funcție de volumul încăperii. Un nebulizator igienizează și transformă spațiile de lucru în medii sigure și sănătoase. Se utilizează la finalul zilei de lucru - pentru unitățile sanitare, școli, grădinițe, universități, încăperi aglomerate, zone industriale, baruri, restaurante, hoteluri.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Dezinfectant de nivel înalt pentru aerul din încăperi;
- Acțiune virucidă, fungicidă, bactericidă și sporicidă certificată;
- Nu conține alcool, aldehyde sau fenoli;
- Este compatibil cu orice tip de material;
- Testat conform normelor UE în vigoare.

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități metrice 0,34%; **Compuși de amoniu cuaternar, benzyl-C12-C18-alcildimetil, cloruri**, concentrație în unități metrice 0,09%.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ

Eficacitate biocidă certificată	Standard testare	Timp acțiune
Bactericidă	SR EN 1276, SR EN 13697, SR EN 13727	5 minute
Bactericidă	SR EN 14561	15 minute
Levuricidă	SR EN 1650, SR EN 13624, SR EN 13697	5 minute
Levuricidă	SR EN 14562	10 minute
Fungicidă	SR EN 13624	5 minute
Fungicidă	SR EN 13697	15 minute
Fungicidă	SR EN 14562	60 minute
Micobactericidă, Tuberculocidă	SR EN 14348	60 minute
Sporicidă	SR EN 13704	60 minute
Virucidă	SR EN 14476	5 minute

INDICAȚII DE UTILIZARE

Scop: Dezinfectarea microaeroflorei prin nebulizare.

Mod folosire: Se realizează dezinfectarea printr-un proces de nebulizare. Dozaj soluție de lucru: nediluat 10 ml/m³; timp de acțiune: 5 minute – pentru dezinfectare de nivel mediu și scăzut; 60 minute – pentru dezinfectare de nivel înalt.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

- Cabinete medicale și spitale;
- Spații comerciale;
- Instituții publice;
- Operatori din industria HoReCa;
- Unități de învățământ;
- Utilizatori industriali.

**Aviz emis de Comisia Națională
pentru Produse Biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24**

MEDTEHNICA S.R.L.
Craiova, Calea Unirii Nr. 91
E-mail: online@medtehnica.ro
Tel: 0351 422 118 / 0743 200 828
WWW.MED-TEHNICA.RO