

MANUAL DE UTILIZARE PENTRU SCAUN CU ROTILE, MULTIFUNCTIONAL



I. Prezentare generală a manualului de operare

- Toate imaginile din acest manual sunt doar pentru referință. Vă rugăm să vă referiți la obiectul real în timpul utilizării.

II. Domeniul de aplicare

- Acest produs este destinat persoanelor cu dizabilități, bolnave, în vârstă sau slăbite, care au dificultăți în a se deplasa.
- Acest produs poate fi utilizat doar de persoanele care se deplasează în interior sau pentru ușurarea tranzitului intestinal.

III. Precauții pentru utilizarea în siguranță

- Dacă nu respectați instrucțiunile, produsul poate fi deteriorat, ceea ce poate duce la răni sau pericol de moarte.
- Toate măsurile de siguranță sunt importante. Vă rugăm să le respectați cu atenție.
- După ce citiți cu atenție acest manual și înțelegeți procesele de operare prezentate, păstrați-l într-un loc vizibil pentru a-l consulta oricând.

AVERTISMENT

1. Înainte de utilizare, verificați dacă toate piesele sunt instalate corect și fixate ferm pentru a asigura siguranța utilizării.
 2. Reglați înălțimea corespunzătoare înainte de utilizare și asigurați-vă că cadrul scaunului din stânga și dreapta sunt la aceeași înălțime.
 3. Când utilizatorul se așază sau se ridică din scaunul rulant, trebuie să calce pe sol și să nu stea pe pedală, deoarece există riscul răsturnării și al accidentării.
 4. În timpul utilizării scaunului rulant, asigurați-vă că blocarea de siguranță și centura sunt fixate.
 5. Când utilizatorul se așază sau se ridică din scaunul rulant, roțile trebuie să fie blocate.
-
6. Atunci când utilizatorul este așezat în scaunul rulant și dorește să ridice obiecte dincolo de scaun, trebuie să fie atent la înclinarea corpului pentru a nu se apleca prea mult și pentru a menține centrul de greutate în zona celor patru roți, evitând astfel răsturnarea.
 7. Nu vă aplecați prea mult în față pentru a ridica obiecte de pe jos, deoarece acest lucru poate duce la pierderea echilibrului și la accidentări.
 8. Când reglați înălțimea scaunului, roțile trebuie să fie blocate, iar mânerul de pe ambele părți trebuie mișcate uniform.

9. Nu urcați treptele din inerție, deoarece acest lucru poate provoca accidente și deteriora scaunul rulant. De asemenea, operatorul nu trebuie să mute pacientul sau persoana cu dizabilități împreună cu scaunul rulant pe scări, pentru a evita pericole suplimentare.
10. Scaunul rulant este destinat deplasării pe teren plat. Evitați gropile și obstacolele pentru a preveni răsturnarea și accidentările.
11. Dacă panta pe care coborâți depășește 5 grade, operatorul trebuie să orienteze spatele scaunului în direcția coborârii și să meargă cu spatele, asigurându-se că este în siguranță. Dacă scaunul este orientat înainte la coborâre, utilizatorul poate cădea în față. Dacă nu sunteți sigur că puteți controla scaunul rulant pe pantă, solicitați ajutor.
12. Evitați să stați pe un teren înclinat. Dacă trebuie să rămâneți pe o astfel de suprafață, blocați toate cele patru roți și reduceți timpul petrecut acolo. În același timp, cineva trebuie să controleze scaunul rulant pentru a asigura siguranța utilizatorului.
13. Frâna celor patru roți ale scaunului rulant trebuie utilizată doar pentru parcare și nu pentru încetinire sau oprire în timpul mișcării.

IV. Specificații tehnice și denumirea componentelor

Dimensiuni:

- **Lungime:** 700 mm
- **Lățime:** 595 mm
- **Înălțime:** 855-1055 mm
- **Dimensiunea roților din față:** 4 inch
- **Dimensiunea roților din spate:** 4 inch
- **Lățimea șezutului:** 460 mm
- **Adâncimea șezutului:** 350 mm
- **Înălțimea șezutului față de sol:** 440-640 mm
- **Înălțimea cadrului roților față de sol:** 155 mm
- **Greutate netă:** 24 kg
- **Sarcina maximă suportată:** 100 kg

Acest produs este compus din bază, cadru pentru șezut stânga și dreapta, oliță, roți din față de 4 inch, roți din spate de 4 inch, tub suport pentru roțile din spate, tub cu rotile, pedală pentru picioare, suport pentru oliță, pernă pentru șezut etc. Materialul este sudat cu țevă din oțel de înaltă rezistență.

Componente:

1. Roată din față de 4 inch
2. Pedală pentru picioare
3. Cadru pentru roțile din spate
4. Roată din spate de 4 inch
5. Bază
6. Oliță
7. Placă pentru șezut
8. Cadrul șezutului stâng
9. Cadrul șezutului drept
10. Suport pentru oliță
11. Mâner



✦ *Imaginile din acest manual sunt doar pentru referință. Vă rugăm să verificați produsul real în timpul utilizării.*

V. Caracteristici de performanță

- Destinat persoanelor cu dificultăți de mobilitate pentru a le ajuta să se deplaseze între canapele, paturi, scaune și toalete.
- Designul cu deschidere largă în spatele scaunului rulant facilitează îngrijirea utilizatorului, prevenind oboseala operatorului, suprasolicitarea fizică și chiar durerile lombare.
- **Capacitate maximă de încărcare:** 100 kg.
- **Înălțimea scaunului** poate fi reglată manual, fiind potrivită pentru mobilier și echipamente de înălțimi diferite.
- **Mecanismul cu lanț și pinion** permite ajustarea sincronizată a înălțimii șezutului pe ambele părți.
- **Roțile medicale silențioase și frâna pe butuc** sunt sigure, stabile și fiabile.
- **Designul cu dublă siguranță** include un sistem de blocare și centură de siguranță pentru protecția utilizatorului.
- **Perna din burete îngroșat** este confortabilă pentru utilizare îndelungată și previne oboseala. Husa pernei poate fi detașată și spălată.


- **Sistemul de deconectare rapidă a coloanei roților din spate** facilitează mișcarea scaunului și extinde raza sa de deplasare.

Performanța în utilizare

- Scaunul rulant este destinat **doar utilizării în interior**, iar viteza maximă de deplasare este ≤ 3 km/h.


VII. Instrucțiuni de instalare

1. **Fixați suportul pentru tubul roților din spate** pe bază cu șuruburi, capace metalice, garnituri și piulițe. Metoda de instalare este aceeași și pentru cealaltă parte.
Vezi figura A pentru detalii.

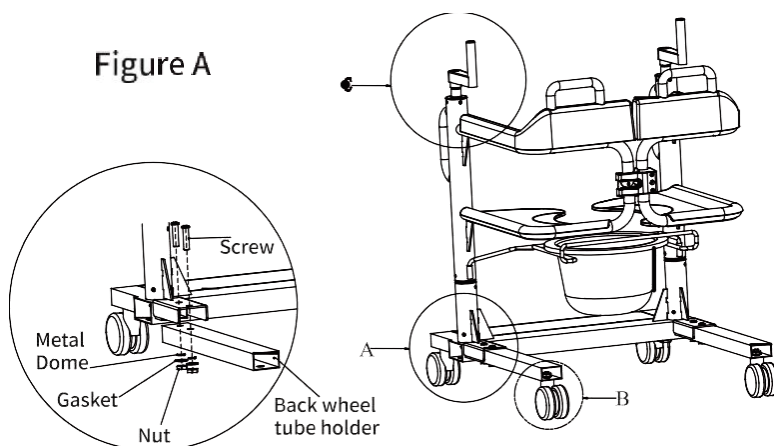


2. **Introducerea șuruburilor pe roțile direcționale**

- Introduceți șuruburile roților direcționale în găurile din suportul pentru tubul roților din spate.
- Adăugați în ordine capacul metalic, garnitura și piulița de siguranță, apoi strângeți piulițele cu o unealtă.
- Celelalte roți sunt fixate în același mod, iar șuruburile se montează la fel.
- **Asigurați-vă că roțile sunt strânse în aceeași direcție ca tuburile roților din spate.**
(Vezi Figura B pentru detalii.)

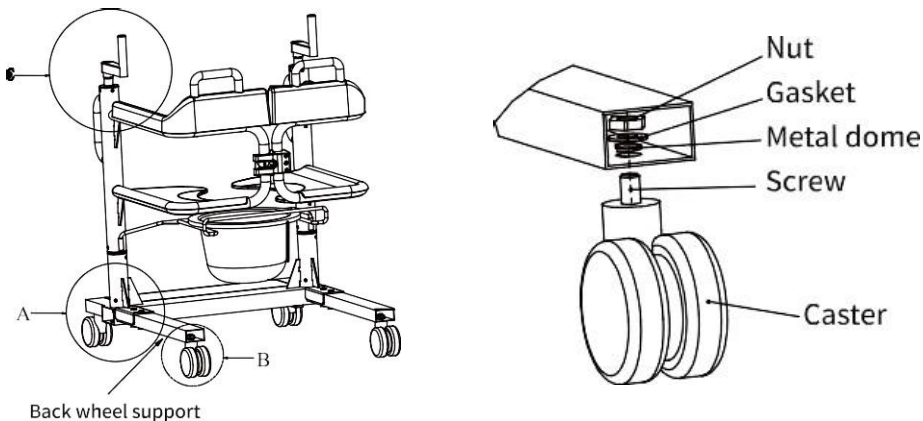


3. Montarea cadrului șezutului

- Introduceți cadrul șezutului stâng și drept în coloanele de suport corespunzătoare.
- Rotiți înainte și înapoi în timp ce apăsați în jos până la poziția inferioară.
(Vezi Figura C.)

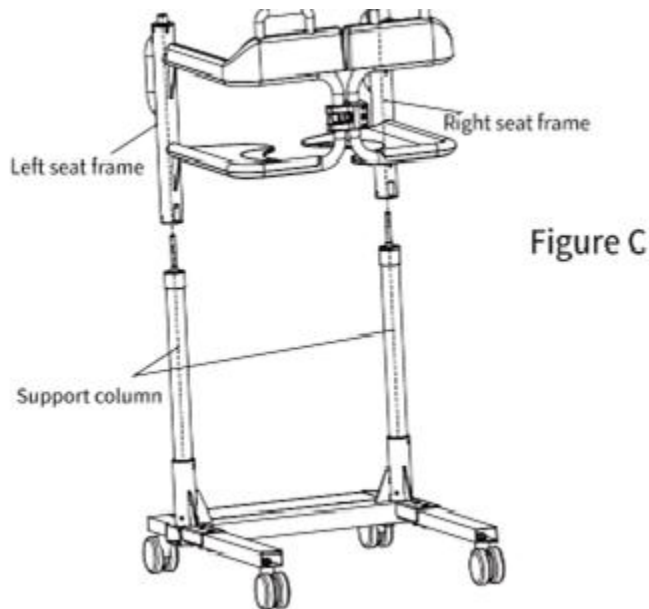

4. Montarea mânerului


- Introduceți un mâner în axul superior al cadrului șezutului stâng.
- Fixați-l cu un șurub, aliniindu-l cu suprafața orizontală a axului, apoi strângeți-l.
- Partea dreaptă se montează în același mod.
(Vezi Figura D.)

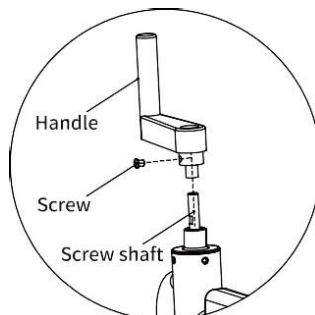

5. Montarea oliței (dacă este necesar)

- Introduceți capetele suportului oliței în tubul de montaj al suportului oliței.

- Introduceți olița în suport, din partea din spate.
(Vezi Figura E.)

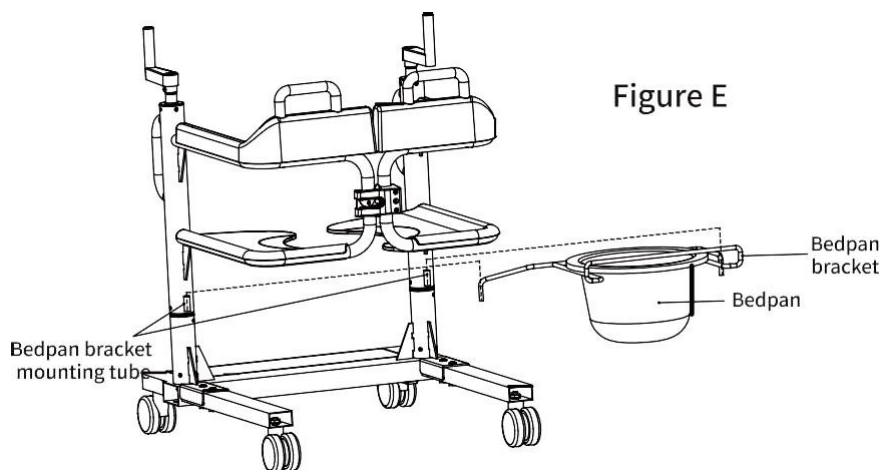

VIII. Instrucțiuni de utilizare

✦ Exemplul de mai jos ilustrează mutarea utilizatorului de pe scaun pe pat. Metoda de utilizare este aceeași și pentru alte tipuri de mobilier sau facilități.

1. Așezarea utilizatorului și ajustarea înălțimii

- Utilizatorul trebuie să stea în poziție verticală.
- Ajustați înălțimea cadrului șezutului astfel încât partea inferioară a acestuia să fie **puțin mai sus** decât nivelul șezutului pe care se află utilizatorul.

2. Deschiderea cadrului șezutului și poziționarea utilizatorului


- Deschideți cadrul șezutului pe ambele părți și mutați-l în fața utilizatorului.
- Reglați poziția scaunului astfel încât **centrul de greutate al utilizatorului să fie la același nivel cu cadrul șezutului**.
- Asigurați-vă că baza șezutului atinge ușor suprafața pe care stă utilizatorul.

3. Blocați cele două frâne frontale de 4 inch, ridicați picioarele utilizatorului și așezați-le pe pedală.
4. Lăsați utilizatorul să-și încline ușor corpul spre stânga și spre dreapta, pe rând, iar în același timp, operatorul rotește cadrul scaunului pe partea corespunzătoare, astfel încât utilizatorul să se așeze, pe rând, în cadrul scaunului mobil.
5. Când utilizatorul este complet așezat pe cadrul stâng și drept al scaunului, închideți complet aceste cadre, blocați manual siguranța și fixați centura de siguranță; (operatorul trebuie să confirme din nou că siguranța este blocată corect).

★ Dacă se alege instalarea tijei pentru perfuzie, rotiți butonul pentru a ajusta înălțimea acesteia. După instalare, îndepărtați tija pentru perfuzie dacă este necesară ajustarea înălțimii cadrului scaunului.

★ Dacă este necesară utilizarea centurii de siguranță, lungimea acesteia trebuie ajustată la poziția corespunzătoare înainte de utilizare.

6. Utilizatorul își ajustează poziția într-un mod confortabil și se ține de mânerele de pe ambele părți.
7. Operatorul verifică distanța dintre partea inferioară a cadrului scaunului și scaun, ridică cadrul scaunului cu 3-5 cm, apoi deblochează frânele frontale de 4 inch și deplasează încet scaunul mobil departe de locul inițial.
8. Operatorul împinge scaunul mobil din față până la marginea patului.
9. Verificați înălțimea cadrului scaunului mobil la marginea patului pentru a vă asigura că partea inferioară a cadrului este ușor mai ridicată decât suprafața patului. (Dacă este necesară ajustarea înălțimii, acest lucru poate fi făcut doar după blocarea celor două roți frontale de 4 inch).
10. Operatorul împinge scaunul mobil complet până la poziția prestabilită lângă patul de spital, blochează frânele frontale de 4 inch și ajustează din nou înălțimea cadrului scaunului, astfel încât partea inferioară a cadrului să atingă ușor suprafața patului.
11. Deschideți centura de siguranță și sistemul de blocare din spatele scaunului mobil, apoi deschideți încet cadrele scaunului din stânga și din dreapta, astfel încât utilizatorul să-și poată așeza fesele pe pat.
12. Operatorul deblochează cele două roți frontale de 4 inch, mută scaunul mobil departe de pat, ridică picioarele utilizatorului și le așază pe pat, permițându-i să se întindă.

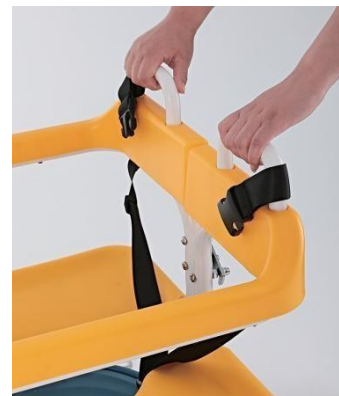

IX. Listă de verificare a pachetului

După deschiderea cutiei, vă rugăm să confirmați următoarele piese și accesorii:

Nr.	Articole Specificații	Cantitate	
1	Bază	Set	1
2	Cadru scaun stânga	Set	1
3	Cadru scaun dreapta	Set	1
4	Spătar plastic stânga	Set	1
5	Spătar plastic dreapta	Set	1
6	Ploscă	Set	1
7	Suport pentru ploscă	Bucată	1
8	Pernă pentru scaun	Foaie	1
9	Roată	Bucată	4
10	Set de unelte	Set	1
11	Accesorii șuruburi	Set	1
12	Manual de utilizare	Set	1
13	Certificat de calitate	Foaie	1

