



Elevatoare nuevo

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

CUPRINS

1.CODURI	PAG.3
2.INTRODUCERE	PAG.3
3.UTILIZAREA PREVĂZUTĂ	PAG.3
4.DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE	PAG.3
5.AVERTISMENTE GENERALE	PAG.4
6.SIMBOLURI FOLOSITE	PAG.4
7.DIMENSIUNI	PAG.5
7.1 Dimensiunile structurii cu capacitate de ridicare de 150 Kg (RI821-RI822-RI823-RI824)	pag. 5
7.2 Dimensiunile structurii cu capacitate de ridicare de 180/200 Kg (RI825-RI826-RI827-RI828) ..	pag. 5
8.DESCRIEREA COMPONENTELOR	PAG.6
9.DESCRIEREA SISTEMULUI DE ACȚIONARE	PAG.6
9.1 Actuator hidraulic (150/180 Kg)	pag. 6
9.2 Sistem electric (150/200 Kg)	pag. 6
10.INSTRUCȚIUNI DE MONTARE A STRUCTURII ELEVATOARELOR (PENTRU TOATE MODELELE)PAG.6	
11.INSTRUCȚIUNI PENTRU MONTAREA ACTUATOARELOR	PAG.7
11.1 Montarea actuatorului hidraulic (valabilă pentru RI821-RI823-RI825-RI827)	pag. 7
11.2 Montarea sistemului electric (valabilă pentru RI822-RI824-RI826-RI828)	pag. 8
12. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	PAG.9
12.1 Instrucțiuni de utilizare pentru modelele hidraulice RI821-RI823-RI825-RI827	pag. 9
12.2 Instrucțiuni de utilizare pentru modelele electrice RI822-RI824-RI826-RI828	pag. 9
13.AVERTISMENTE	PAG.11
14.CURĂȚAREA	PAG.11
15.ÎNȚREȚINEREA	PAG.11
16.PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII	PAG.11
17.CONDIȚII DE ELIMINARE	PAG.12
17.1 Avertismente pentru eliminarea corectă a produsului	
în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE	pag.12
17.2 Gestionarea bateriilor uzate (Directiva 2006/66/CE)	pag. 12
18. GARANȚIA	PAG.12
18.1 Garanția acumulatorilor	pag. 13
18.2 Reparații	pag. 13
18.3 Piese de schimb	pag. 13
18.4 Clauze de exonerare	pag. 13



Dispozitiv medical din clasa I

REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale

1. CODURI

ELEVATOARE HIDRAULICE

- RI821** - actuator HIDRAULIC, capacitate de ridicare 150 Kg, deschidere brațe bază cu pedală
RI823 - actuator HIDRAULIC, capacitate de ridicare 150 Kg, deschidere brațe bază cu manetă
RI825 - actuator HIDRAULIC, capacitate de ridicare 180 Kg, deschidere brațe bază cu pedală
RI827 - actuator HIDRAULIC, capacitate de ridicare 180 Kg, deschidere brațe bază cu manetă

ELEVATOARE ELECTRICE

- RI822** - actuator ELECTRIC, capacitate de ridicare 150 Kg, deschidere brațe bază cu pedală
RI824 - actuator ELECTRIC, capacitate de ridicare 150 Kg, deschidere brațe bază cu manetă
RI826 - actuator ELECTRIC, capacitate de ridicare 200 Kg, deschidere brațe bază cu pedală
RI828 - actuator ELECTRIC, capacitate de ridicare 200 Kg, deschidere brațe bază cu manetă

R0

2. INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales un elevator din linia **MUEVO by MOPEDIA** de la MORETTI S.p.A. Designul și calitatea acestora garantează confort, siguranță și fiabilitate maxime. Elevatoarele **MUEVO by MOPEDIA** de la MORETTI S.p.A. au fost proiectate și fabricate pentru a satisface toate nevoile dvs. în ceea ce privește o utilizare practică și corectă. Acest manual de utilizare conține mici recomandări pentru utilizarea corectă a dispozitivului ales și sfaturi valoroase pentru siguranța dumneavoastră. Vă recomandăm să citiți cu atenție întregul manual înainte de a utiliza elevatorul. Dacă aveți nelămuriri vă rugăm să contactați revânzătorul, care vă va putea ajuta și sfătui în mod corect.

3. UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Elevatoarele din linia **MUEVO by MOPEDIA** sunt destinate ridicării și transferului persoanelor cu dificultăți motorii, cu ajutorul unui însoțitor care acționează comenzile. Acestea nu pot fi folosite de o singură persoană. Moretti S.p.A. nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului sau din alte utilizări decât cele indicate în acest manual.

4. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE

MORETTI SpA declară pe proprie răspundere că produsele fabricate și introduse pe piață de MORETTI SpA și care fac parte din familia de ELEVATOARE PENTRU PERSOANE CU PROBLEME LOCOMOTORII MOPEDIA sunt conforme cu dispozițiile aplicabile ale Regulamentului 2017/745 privind DISPOZITIVELE MEDICALE din 5 aprilie 2017.

În acest scop MORETTI SpA garantează și declară, pe proprie răspundere, următoarele:

1. Aceste dispozitive îndeplinesc cerințele generale de securitate și performanță prevăzute în anexa I la Regulamentul 2017/745, conform indicațiilor anexei IV la acest regulament.
2. Aceste dispozitive NU SUNT INSTRUMENTE DE MĂSURĂ.
3. Aceste dispozitive NU SUNT DESTINATE INVESTIGAȚIILOR CLINICE.
4. Aceste dispozitive sunt comercializate în ambalaje NESTERILE.
5. Aceste dispozitive trebuie considerate ca aparținând clasei I în conformitate cu prevederile anexei VIII la regulamentul menționat anterior.
6. MORETTI SpA păstrează și pune la dispoziția Autorităților competente, timp de cel puțin 10 ani de la data fabricării ultimului lot, documentația tehnică ce dovedește conformitatea cu Regulamentul 2017/745.

Notă: Codurile complete ale produselor, numărul de înregistrare al Producătorului (SRN), codul UDI-DI de bază și orice referințe la standardele utilizate se regăsesc în Declarația de conformitate UE pe care MORETTI SPA o emite și o pune la dispoziție prin intermediul canalelor sale.

5. AVERTISMENTE GENERALE



ATENȚIE!

Acordați întotdeauna o atenție deosebită componentelor în mișcare care ar putea cauza prinderea membrelor și vătămarea corporală.

- Pentru a asigura utilizarea corectă a dispozitivului vă rugăm să consultați acest manual, acordând o atenție deosebită capitolului Întreținere și avertismentelor înainte de fiecare utilizare.
- Pentru utilizarea corectă a dispozitivului consultați medicul sau terapeutul dvs.
- Păstrați produsul ambalat departe de orice sursă de căldură, deoarece ambalajul este realizat din carton.
- Durata de viață utilă a accesoriului este determinată de uzura pieselor ce nu pot fi reparate și/sau înlocuite.
- Aveți mare grijă în prezența copiilor.
- Nu depășiți capacitatea maximă de ridicare permisă.
- Utilizatorul și/sau pacientul trebuie să raporteze orice incident grav legat de dispozitiv producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

RO

6. SIMBOLURI FOLOSITE



Codul produsului



Cod unic de identificare a dispozitivului



Marcaj CE



Producător



Lot de producție



Citiți manualul pentru instrucțiuni



Dispozitiv medical



Condiții de eliminare



Atenție



Data fabricării



Eliminarea produsului în conformitate cu Directiva CE/19/2012

IP54



Protecție împotriva prafului și stropirii



Parte aplicată de tip B

7. DIMENSIUNI



7.1 Dimensiunile structurii cu capacitate de ridicare de 150 Kg (RI821-RI822-RI823-RI824)

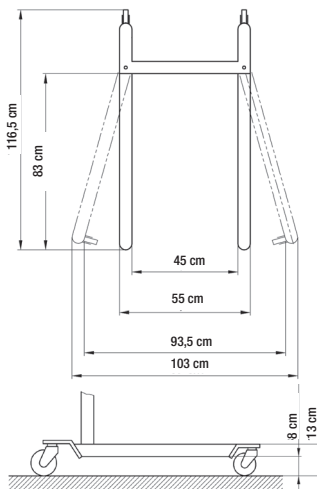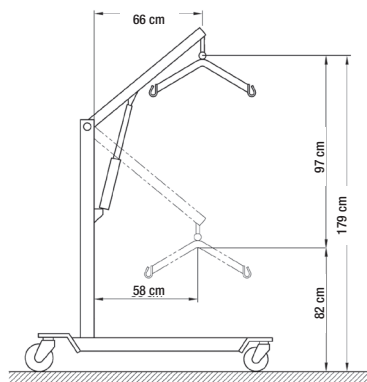

R0


- Greutate elevator cu structură mică și sistem electric: **35 Kg**
- Greutate elevator cu structură mică și sistem hidraulic: **33 Kg**

7.2 Dimensiunile structurii cu capacitate de ridicare de 180/200 Kg (RI825-RI826-RI827-RI828)

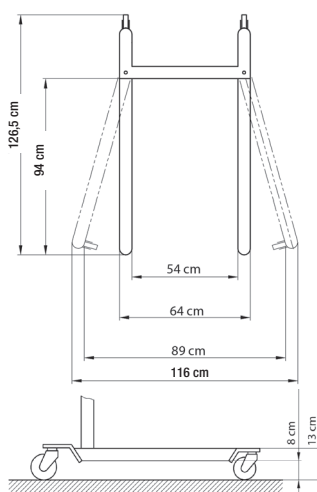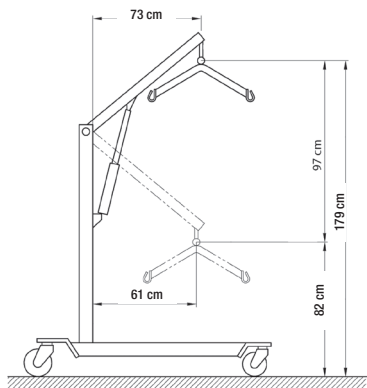

- Greutate elevator cu structură mare și sistem electric: **37 Kg**
- Greutate elevator cu structură mare și sistem hidraulic: **35 Kg**

8. DESCRIEREA COMPONENTELOR

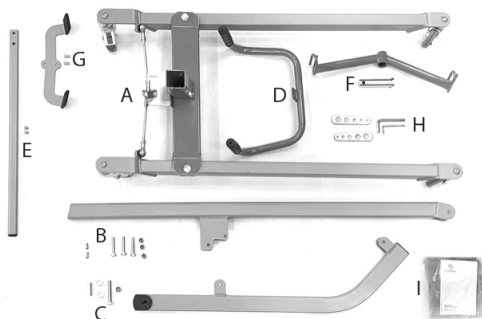

- A - 1 bază cu roți
- B - 1 coloană
- C - 1 braț
- D - 1 mâner
- E - 1 manetă (numai pentru RI823-RI824-RI827-RI828)
- F - 1 bară de echilibrare cu sisteme de prindere pentru ham
- G - 1 pedală (numai pentru RI821-RI822-RI825-RI826)
- H - accesorii de montare
- I - 1 ham standard

R0

(Imagini cu scop ilustrativ)

9. DESCRIEREA SISTEMULUI DE ACȚIONARE


9.1 Actuator hidraulic (150/180 Kg)

Valabil pentru modelele RI821-RI823-RI825-RI827



9.2 Sistem electric (150/200 Kg)


Valabil pentru modelele RI822-RI824-RI826-RI828

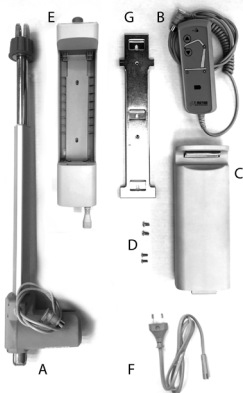

- A - 1 actuator TIMOTION
- B - 1 telecomandă TIMOTION
- C - 1 baterie TIMOTION
- D - 4 șuruburi pentru fixarea unității de comandă
- E - 1 unitate de comandă TIMOTION
- F - 1 cablu pentru încărcarea bateriilor
- G - 1 suport pentru unitatea de comandă

10. INSTRUȚIUNI DE MONTARE A STRUCTURII ELEVATOARELOR (PENTRU TOATE MODELELE)


1. Deșurubați șurubul de la baza coloanei. (Fig.4)
2. Introduceți coloana în cavitatea prevăzută în bază. (Fig.4)
3. Introduceți șurubul care blochează coloana în bază și înșurubați-l bine. (Fig.4)
4. Introduceți bucsa în orificiul brațului prevăzut pentru introducerea în articulația coloanei (Fig.5a)
5. Prindeți brațul de coloană cu ajutorul șuruburilor furnizate. (Fig. 5b)
6. Poziționați mânerul pe coloană și fixați-l cu cele 2 șuruburi. (Fig.6)

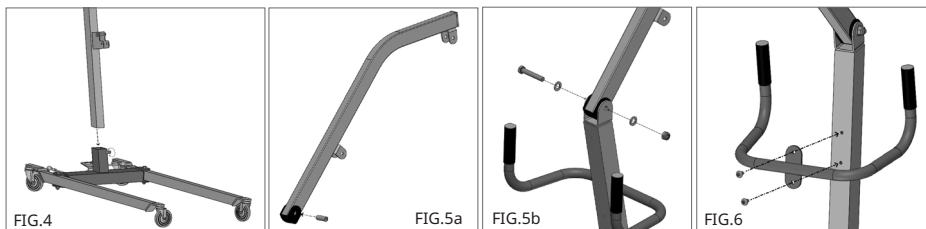

(Imagini cu scop ilustrativ)

7. Poziționați bara de echilibrare în cârligul corespunzător, aflat la capătul brațului de ridicare. (Fig.7)
- 8a. Introduceți maneta pentru deschiderea bazei și fixați-o cu șuruburile sale. (Fig.8a – pentru modelele RI823-RI824-RI827-RI828)
- 8b. Introduceți pedala pentru deschiderea bazei și fixați-o cu șuruburile sale. (Fig.8b - pentru modelele RI821-RI822-RI825-RI826)
9. Structura va fi complet asamblată; instalați actuatorul hidraulic/electric corespunzător tipului de elevator pentru persoane cu probleme locomotorii ales.


R0

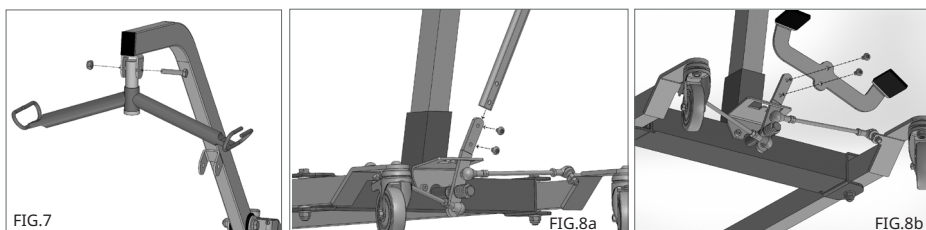

(Imagini cu scop ilustrativ)

11. INSTRUCȚIUNI PENTRU MONTAREA ACTUATOARELOR

11.1 Montarea actuatorului hidraulic (valabilă pentru RI821-RI823-RI825-RI827)

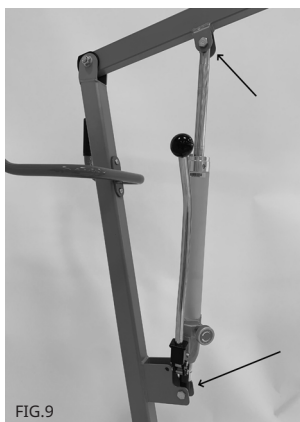

(Imagini cu scop ilustrativ)

1. Așezați actuatorul hidraulic așa cum se arată în figură și fixați-l bine în partea de sus și de jos cu ajutorul șuruburilor și piulițelor cu autoblocare. (Fig.9)

11.2 Montarea sistemului electric (valabilă pentru RI822-RI824-RI826-RI828)

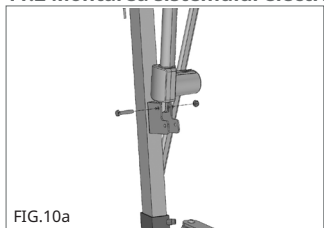


FIG.10a

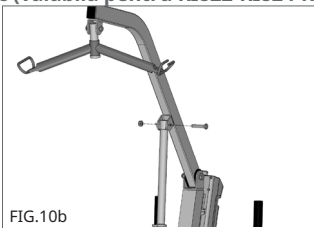


FIG.10b

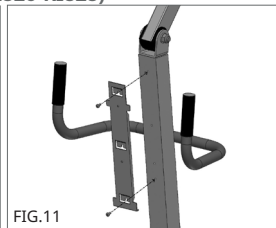


FIG.11

(Imagini cu scop ilustrativ)

1. Scoateți cele două șuruburi prevăzute pe braț și pe coloană pentru fixarea actuatorului. Introduceți actuatorul și fixați-l cu cele două șuruburi pe care le-ați scos înainte. (Fig.10a-10b)
2. Fixați consola de susținere a unității de comandă pe coloană cu șuruburile furnizate, folosind orificiile prevăzute. (Fig.11)
3. Introduceți unitatea de comandă pe consola montată anterior prin glisare de sus în jos și fixați-o cu ajutorul șuruburilor. (Fig.12a-12b)
4. Introduceți bateria în unitatea de comandă. (Fig.13a-13b)
5. Conectați conectorul actuatorului la canalul central al unității de comandă, iar telecomanda la canalul din dreapta. (Fig.14). Sistemul electric este complet asamblat și gata de utilizare (fig.15)



FIG.12a

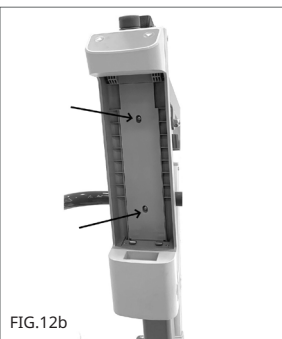



FIG.12b



FIG.13a



FIG.13b

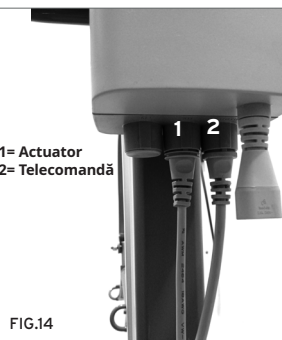

1= Actuator
2= Telecomandă

FIG.14



FIG.15

(Imagini cu scop ilustrativ)

Notă: înainte de utilizare asigurați-vă că butonul de urgență nu este apăsător; dacă este activat, eliberați-l pentru a activa unitatea de comandă.

12. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

12.1 Instrucțiuni de utilizare pentru modelele hidraulice RI821-RI823-RI825-RI827

- Înainte de ridicare, deschideți brațele bazei cât mai mult posibil:
 - trageți ușor cu piciorul pedala de deschidere spre dvs., apoi rotiți-o spre stânga și blocați-o în poziția deschis (pentru RI821-RI825)
 - trageți ușor maneta de deschidere spre dvs., apoi rotiți-o spre stânga și blocați-o în poziția deschis (pentru RI823-RI827)
 (Efectuați aceleași operațiuni în ordine inversă pentru a readuce baza în poziția închis)
- Blocați frânele roților din spate
- Asigurați-vă că pacientul se află în poziție centrală între brațele bazei și întotdeauna cu fața spre persoana care îl ajută
- Prindeți cu grijă curelele hamului în bara de echilibrare
- Asigurați-vă că supapa pompei hidraulice este complet închisă (pentru aceasta rotiți în direcția „CLOSE”)
- Acționați maneta de pompare a actuatorului hidraulic pentru a începe ridicarea
- VERIFICAȚI PERMANENT POZIȚIA CORECTĂ A PACIENTULUI PE TOATĂ DURATA MIȘCĂRII!**
- Ridicați pacientul la înălțimea necesară, menținându-l cu fața spre persoana care îl ajută
- Deblocați roțile din spate și transferați pacientul
- Înainte de a începe coborârea pacientului blocați din nou roțile din spate
- Începeți coborârea pacientului rotind încet supapa pompei hidraulice în direcția „OPEN”

N.B. Pentru a efectua o coborâre lentă deschideți ușor supapa; dacă doriți să măriți viteza, rotiți-o mai mult în direcția „OPEN”

12. VERIFICAȚI PERMANENT POZIȚIA CORECTĂ A PACIENTULUI PE TOATĂ DURATA MIȘCĂRII!

ÎN TIMPUL COBORÂRII AJUTAȚI PERMANENT PACIENTUL, VERIFICÂND POZIȚIA CORECTĂ A ȘEZUTULUI!

ATENȚIE!

În timpul coborârii evitați ca pacientul să întâlnească un obstacol care să împiedice coborârea sa. În acest caz ridicați din nou pacientul și eliminați cauza care obstaculează coborârea.

12.2 Instrucțiuni de utilizare pentru modelele electrice RI822-RI824-RI826-RI828



ATENȚIE!

ATUNCI CÂND FOLOSIȚI PENTRU PRIMA DATĂ ELEVATORUL ELECTRIC PENTRU PERSOANE CU PROBLEME LOCOMOTORII SE RECOMANDĂ SĂ ÎNCĂRCAȚI BATERIILE TIMP DE APROXIMATIV 6-8 ORE. ULTERIOR ASIGURAȚI-VĂ CĂ BATERIA ESTE ÎNCĂRCATĂ ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE.

- Înainte de ridicare, deschideți brațele bazei cât mai mult posibil:
 - trageți ușor cu piciorul pedala de deschidere spre dvs., apoi rotiți-o spre stânga și blocați-o în poziția deschis (pentru RI822-RI826)
 - trageți ușor maneta de deschidere spre dvs., apoi rotiți-o spre stânga și blocați-o în poziția deschis (pentru RI824-RI828)
 (Efectuați aceleași operațiuni în ordine inversă pentru a readuce baza în poziția închis)
- Blocați roțile din spate
- Asigurați-vă că pacientul se află în poziție centrală între brațele bazei și întotdeauna cu fața spre persoana care îl ajută
- Prindeți cu grijă curelele hamului în bara de echilibrare
- Folosiți tasta săgeată sus pentru a ridica pacientul
- VERIFICAȚI PERMANENT POZIȚIA CORECTĂ A PACIENTULUI PE TOATĂ DURATA MIȘCĂRII!**
- Ridicați pacientul la înălțimea necesară, menținându-l cu fața spre persoana care îl ajută
- Deblocați roțile din spate și transferați pacientul
- Înainte de a începe coborârea pacientului blocați din nou roțile din spate

10. Pentru a coborî pacientul apăsați butonul săgeată în jos

11. VERIFICAȚI PERMANENT POZIȚIA CORECTĂ A PACIENTULUI PE TOATĂ DURATA MIȘCĂRII!

ÎN TIMPUL COBORĂRII AJUTAȚI PERMANENT PACIENTUL, VERIFICÂND POZIȚIA CORECTĂ A ȘEZUTULUI!

ATENȚIE!

În timpul coborării evitați ca pacientul să întâlnească un obstacol care să împiedice coborârea sa. În acest caz ridicați din nou pacientul și eliminați cauza care obstaculează coborârea.

FUNCȚIA AUTOMATĂ DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA STRIVIRII

Sistemul electric include o funcție automată de protecție împotriva strivirii pacientului care oprește coborârea brațului de ridicare în cazul unui contact accidental între pacient și un obstacol.

RO



OPRIREA DE URGENȚĂ

Pe unitatea de comandă se află un buton roșu „STOP” care, dacă este apăsat, dezactivează imediat toate comenzile. Pentru a relua funcționarea normală rotiți butonul roșu în sens orar până când acesta se ridică și revine în poziția de repaus.

COMENZILE DE URGENȚĂ

Pe unitatea de comandă există două butoane (unul cu săgeata în sus și celălalt cu săgeata în jos) care pot fi utilizate în locul celor de pe telecomandă pentru a efectua operațiunile în cazul în care telecomanda nu funcționează corect.

COBORÂREA MECANICĂ A ACTUATORULUI

În cazul în care se utilizează coborârea manuală/mechanică, asigurați-vă că aceasta se realizează în condiții de siguranță deplină pentru pacient. Pentru a activa coborârea manuală/mechanică trageți în jos inelul roșu din partea superioară a actuatorului și rotiți-l în sens antiorar. La terminarea coborârii readuceți inelul roșu în poziția de repaus.

INDICAREA STĂRII DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

Starea de încărcare a bateriei este semnalată cu ajutorul unui indicator cu 3 leduri. Acest indicator se află pe telecomandă. Trei leduri aprinse indică încărcarea completă a bateriei, în timp ce un singur led aprins indică faptul că bateria este descărcată și trebuie reîncărcată. Bateria standard, în stare nouă, cu încărcare completă și o temperatură externă de utilizare și depozitare de 20°C are o autonomie de peste 40 de cicluri cu o sarcină de 200 kg; reducerea sarcinii ridicate corespunde unei creșteri a autonomiei bateriei și, prin urmare, a ciclurilor care pot fi efectuate.

MODUL DE REÎNCĂRCARE A BATERIILOR

- Conectați cablul de încărcare la priza de alimentare și apoi la intrarea corespunzătoare a unității de comandă.
- Pe telecomandă există un indicator LED care clipește în timpul fazei de încărcare dacă bateria se încarcă. Încărcați bateria până când cele trei lumini LED se aprind.
- Nu uitați întotdeauna să deconectați adaptorul de încărcare a bateriei înainte de a utiliza liftul!
- Încărcați bateriile timp de cel puțin 6 ore înainte de a utiliza dispozitivul.

ATENȚAO!



- Înainte de încărcare, asigurați-vă că butonul roșu ciupercă de urgență „STOP” din partea superioară a unității de comandă nu este apăsat. Pentru a face acest lucru, rotiți și trageți butonul ciupercă spre dvs., deoarece dacă este apăsat, nu permite reîncărcarea bateriei.
- În timpul operațiunilor de încărcare, sistemul nu permite nicio mișcare a actuatorului și deci a brațului de ridicare din motive de siguranță.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA TELECOMENZII

Telecomanda este conectată la unitatea de comandă prin intermediul unui cablu spiralat extensibil.



Tastele de pe telecomandă:

1. butonul „up” pentru ridicare
2. butonul „down” pentru coborâre

Indicatoarele de pe telecomandă:

3. led pentru indicarea suprasarcinii: elevatorul este prevăzut cu un dispozitiv de control al suprasarcinii care oprește mișcarea în cazul depășirii pragului de suprasarcină și care generează un semnal vizual și sonor
4. led pentru indicarea stării de încărcare a bateriei

RO

13. AVERTISENTE

- Elevatorul este un dispozitiv care permite efectuarea unor transferuri scurte ale unui pacient cu dificultăți de deplasare, cum ar fi de la un pat la un scaun cu roțile sau la un scaun confortabil sau invers. Elevatorul nu trebuie utilizat pentru a transporta pacientul.
- Atunci când ridicați bolnavul asigurați-vă că brațele bazei sunt deschise cât mai mult posibil, că maneta de comandă este blocată în siguranță în poziția sa și că frânele roților din spate sunt blocate.
- În timpul transferului evitați să treceți peste obstacole care ar putea provoca răsturnarea.
- Utilizarea elevatorilor pentru persoane cu probleme locomotorii descrise în acest manual, în combinație cu hamurile Moretti prevăzute ca accesorii, permite preluarea și ridicarea pacienților de la sol.



ATENȚIE!

Asigurați-vă întotdeauna că hamurile sunt în stare bună. Nu utilizați hamuri care prezintă semne de deteriorare sau uzură.

14. CURĂȚAREA

Pentru curățarea hamurilor și a structurii folosiți o soluție de alcool și săpun neutru în părți egale, amestecate cu apă.

15. ÎNTREȚINEREA

Este extrem de important ca elevatorul să fie verificat înainte de fiecare utilizare:

- Vă rugăm să verificați, în special, dacă toate șuruburile și buloanele sunt bine strânse
- Dacă elevatorul se poate deplasa liber, cu frânele roților inactive
- Verificați dacă frânele roților din spate funcționează corect

Este foarte important să verificați periodic dacă știfturile de conectare și inelele lor de fixare sunt poziționate corect (știfturile conectează actuatorul în partea de sus și de jos cu elevatorul și bara de echilibrare în punctele de conectare a hamului)

Piesele mecanice trebuie lubrifiate cu o picătură de ulei pentru a favoriza glisarea corectă și rezistența la uzură. Acordați o atenție deosebită dispozitivului mecanic pentru îndepărtarea brațelor bazei elevatorului pentru persoane cu probleme locomotorii. Lubrifiați conform indicațiilor de mai sus la fiecare două-trei luni

16. PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Pentru piesele de schimb și accesorii consultați întotdeauna catalogul Master MORETTI.

Accesorii

Cod RP828 Structură de tip targă pentru elevatorul pentru persoane cu probleme locomotorii (capacitate de ridicare maximă 150 Kg)

Cod BLC250 Cântar pentru elevatorul pentru persoane cu probleme locomotorii Clasa III

Cod RP881 Ham standard cu tetieră „basic”

Cod IM100-IM101 Ham standard fără tetieră

Cod IM110-IM111 Ham standard cu tetieră

Cod IM120 Ham complet cu suporturi

Cod IM140 Ham pentru toaletă fără tetieră

Cod IM141 Ham pentru toaletă cu tetieră

Cod IM150 Ham complet pentru amputați

UTILIZAȚI NUMAI ACCESORIILE ORIGINALE MORETTI. ÎN CAZ CONTRAR NU NE ASUMĂM NICIO RĂSPUNDERE PENTRU ACCIDENTELE CAUZATE DE UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE.

RO

17. CONDIȚII DE ELIMINARE

Atunci când eliminați dispozitivul nu utilizați niciodată sistemele obișnuite de gestionare a deșeurilor solide municipale. Vă recomandăm să eliminați dispozitivul prin intermediul insulelor ecologice municipale pentru recircularea planificată a materialelor utilizate.

17.1 Avertismente pentru eliminarea corectă a produsului în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE



La sfârșitul duratei sale de viață utilă produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale. Acesta poate fi predat centrelor speciale de colectare separată a deșeurilor organizate de administrațiile comunale sau revânzătorilor care oferă acest serviciu. Prin eliminarea separată a produsului pot fi evitate posibilele consecințe negative pentru mediu și sănătate care derivă din eliminarea sa necorespunzătoare, permițând în același timp recuperarea materialelor din care este realizat pentru a asigura o economie semnificativă de energie și resurse. Pentru a indica obligația de eliminare separată a echipamentelor electromedicale, produsul este marcat cu o pubea cu roți barată.

17.2 Gestionarea bateriilor uzate (Directiva 2006/66/CE)



Simbolul de pe produs indică faptul că bateriile nu trebuie considerate deșeuri menajere normale. Asigurându-vă că bateriile sunt eliminate corect contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății care ar putea fi cauzate de eliminarea lor necorespunzătoare. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale. Predați bateriile uzate la punctele de colectare indicate pentru reciclare. Pentru informații mai detaliate privind modul de eliminare a bateriilor uzate sau a produsului puteți contacta Primăria, serviciul local de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat aparatul.

18. GARANȚIA

Toate produsele Moretti sunt garantate împotriva defectelor de material sau de manoperă pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data vânzării produsului, cu excepția excluderilor și limitărilor

specificate în continuare. Această garanție nu este valabilă în cazul utilizării necorespunzătoare, abuzului sau modificării produsului și în cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare. Utilizarea prevăzută corectă a produsului este indicată în manualul de utilizare. Moretti nu răspunde pentru daunele derivate, pentru vătămarea corporală sau pentru orice alte situații cauzate sau legate de instalarea și/sau utilizarea echipamentului care nu respectă cu strictețe instrucțiunile din manualele de instalare, montare și utilizare. Moretti nu garantează produsele Moretti împotriva deteriorărilor sau defectelor în următoarele situații: dezastre naturale, lucrări de întreținere sau reparații neautorizate, daune rezultate din probleme la alimentarea cu energie electrică (dacă este cazul), utilizarea pieselor sau componentelor care nu au fost furnizate de Moretti, nerespectarea liniilor de orientare și a instrucțiunilor de utilizare, modificări neautorizate, daune cauzate de expediere (altele decât cele cauzate de expedierea inițială de către Moretti) sau neefectuarea întreținerii conform indicațiilor din manual. Componentele supuse uzurii nu sunt acoperite de această garanție în cazul în care deteriorarea poate fi atribuită utilizării normale a produsului.

18.1 Garanția acumulatorilor

Bateriile originale și cele de schimb sunt acoperite de o garanție de 90 (nouăzeci) de zile în ceea ce privește performanțele și de 6 (șase) luni în ceea ce privește defectele de fabricație sau în conformitate cu prevederile legale. Dacă bateriile complet încărcate sunt nefolosite timp de mai mult de trei luni consecutive, garanția este anulată automat. Dacă bateriile complet descărcate sunt nefolosite timp de mai mult de trei zile consecutive, garanția este anulată automat.

RO

18.2 Reparații

În cazul în care un produs Moretti prezintă defecte de material sau de fabricație în timpul perioadei de garanție, Moretti va evalua împreună cu clientul dacă defectul produsului este acoperit de garanție. Moretti poate înlocui sau repara articolul în garanție la discreția sa, fie la un revânzător Moretti specificat, fie la sediul său. Cheltuielile de manoperă legate de repararea produsului pot fi suportate de Moretti dacă se stabilește că reparația intră în sfera de aplicare a garanției. Repararea sau înlocuirea nu reînnoiește și nu prelungește garanția. Un produs care nu este acoperit de garanție poate fi returnat pentru reparații numai după autorizarea în prealabil de către Serviciul Clienți Moretti. Cheltuielile de manoperă și transport aferente unei reparații care nu este acoperită de garanție sunt suportate integral de client sau de revânzător. Reparațiile produselor care nu sunt acoperite de garanție sunt garantate timp de 6 (șase) luni de la data primirii produsului reparat. Clientul va fi informat în cazul în care, după examinarea și testarea unui produs returnat, Moretti ajunge la concluzia că produsul nu este defect. Produsul va fi restituit clientului, iar acesta va trebui să suporte cheltuielile de transport aferente restituirii.

18.3 Piese de schimb

Piesele de schimb originale Moretti sunt garantate timp de 6 (șase) luni de la data primirii piesei de schimb.

18.4 Clauze de exonerare

Cu excepția celor stabilite în mod expres în această garanție și în măsura permisă de lege, Moretti nu oferă nicio altă declarație, garanție sau condiție, expresă sau implicită, precum și nicio altă declarație, garanție sau condiție de vandabilitate, adecvare la un anumit scop, nerespectare și neinterferență. Moretti nu garantează că utilizarea produsului Moretti va fi neîntreruptă sau fără erori. Durata oricăror garanții implicite care pot fi impuse de reglementările legale este limitată la perioada de garanție, în limitele reglementărilor legale. Unele state sau țări nu permit limitarea duratei unei garanții implicite sau excluderea ori limitarea daunelor accidentale sau indirecte aferente produselor destinate consumatorilor. În aceste state sau țări este posibil ca anumite excluderi sau limitări ale acestei garanții să nu se aplice utilizatorului. Această garanție poate fi modificată fără nicio notificare prealabilă.

**CERTIFICAT DE GARANȚIE****R0**

Produsul _____

Achiziționat pe data de _____

Revânzător _____

Strada _____ Localitatea _____

Vândut dnei./dlui. _____

Strada _____ Localitatea _____

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**MADE IN ITALY**