

[Pagina 1 – Cerințe generale de tipărire pentru manualul scaunului rulant manual în limba engleză]

Dimensiune: 257 × 185 mm

Culoare: Precisă, monocromă, clară în straturi

Hârtie: Hârtie dublu cretată de 80g

Post-procesare: Capsare pe mijloc (capsare tip caiet)

JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.


No.1 Baisheng Road, Zona de dezvoltare, Danyang,

Jiangsu 212300, CHINA

www.yuwell.com

Manual de utilizare
Cărucior cu roțile model 2002

yuwell

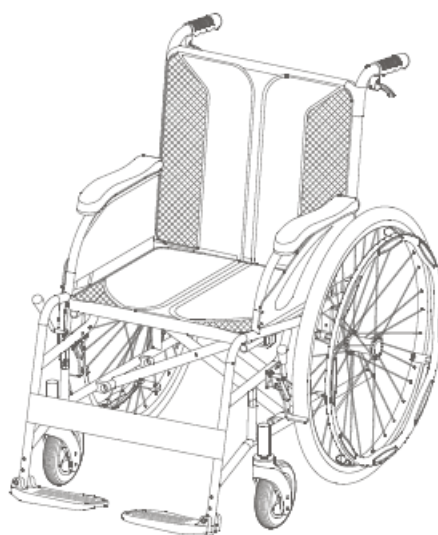

Prefață

Vă mulțumim pentru achiziționarea scaunului rulant produs de Yuwell.

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de utilizare, pentru operare și întreținere corectă. Păstrați manualul într-un loc sigur.

Cuprins

Note de siguranță	01
Utilizare și structură produs	01
Performanțe tehnice principale	02
Numele pieselor	02
Instalare și utilizare	03
Întreținere	04
Precauții	05

Toate specificațiile și configurațiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Note de siguranță

NOTĂ:

1. Orice tip de transport este strict interzis atunci când cineva este așezat în scaunul rulant.
2. Frâna este strict interzisă în mișcare. Dacă nu este un însoțitor, țineți roata de mână și opriți treptat.
3. Nu călcați pe suportul pentru picioare, altfel scaunul se va răsturna.
4. Fără acordul tehnicianului, modificările neautorizate sunt strict interzise.
Compania noastră nu își asumă răspunderea pentru accidente cauzate.
5. Nu vă aplecați în timpul mersului, acest lucru poate afecta stabilitatea rulării.

NOTĂ:

1. Însoțitorul trebuie să stea aproape la prima utilizare.
2. Nu vă înclinați înapoi dacă nu există un dispozitiv anti-răsturnare.
3. Nu înclinați sau ridicați scaunul rulant în timpul utilizării.
4. Scaunul rulant trebuie parcat pe o suprafață plană.
5. Țineți roțile departe de surse de căldură.
6. Nu apăsați pe brațul de sprijin când desfaceți scaunul rulant.
7. Suportul pentru picioare trebuie reglat la peste 50 mm deasupra solului.
8. Folosiți scaunul conform limitei de încărcare (inclusiv obiectele de pe el), așa cum este indicat pe cadru.
9. Instalați corect dispozitivul anti-răsturnare dacă scaunul este echipat cu unul, înainte de utilizare.

Utilizarea și structura produsului


 Acest produs este conceput ca mijloc de transport pentru persoane cu dizabilități, pacienți și persoane în vârstă.

 Acest produs este compus din: cadru, bare încrucișate, braț de sprijin, panou pentru braț, suport pentru picioare, frână de mână, mâner, roți față, roți spate, frână, pernă pentru șezut, spătar etc.

Performanțe tehnice principale

- **Performanță la aterizare:** Toate roțile trebuie să atingă solul lin, cu excepția roților de ridicare.
- **Stabilitate statică:**
 - longitudinală $\geq 10^\circ$
 - laterală $\geq 15^\circ$
- **Performanță de reținere pe pantă:** $\leq 8^\circ$
- **Deplasare laterală:** ≤ 350 mm
- **Raza minimă de întoarcere:** $\geq 0,85$ m
- **Lățimea minimă de viraj:** $\geq 1,5$ m

Denumire Piese (Figura 1)

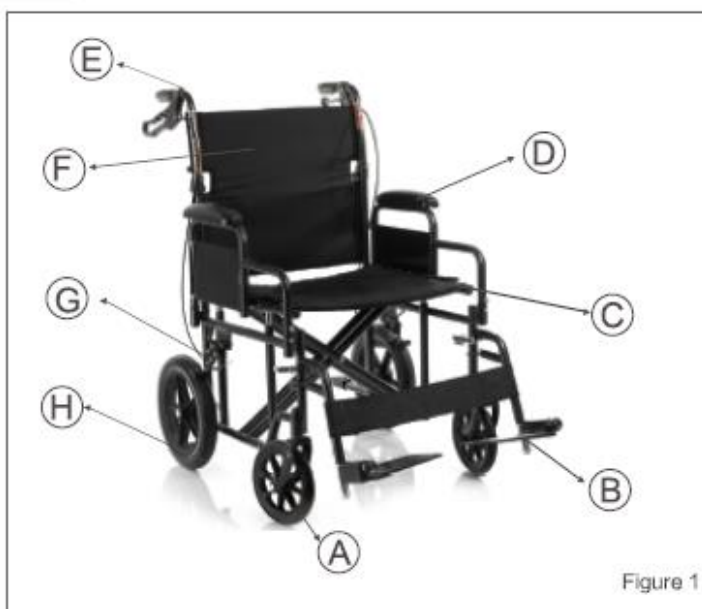

Simbol-Componentă

A	Roată fronta
B	Suport picioare
C	Pernă
D	Cotieră
E	Mâner
F	Spătar
G	Frână de mână
H	Roată spate

Instalare și aplicare

Metoda de deschidere

- Separă cadrul către stânga și dreapta, ținând de mâner. Aplatizează perna cu palmele (vezi Figura 2). Scaunul rulant se va deschide.
- ⚠ Notă: Nu deschide cotierele cu forța, pentru a evita deteriorarea. Nu pune degetele în țeava cadrului ca să nu te rănești.



Metoda de pliere

- Ridică suporturile pentru picioare, apoi ridică ușor ambele capete ale pernei din față și din spate. Scaunul se va plia.

Urcare și coborâre din scaunul rulant



- **Pentru urcare:** Pune frâna. Ține de cotieră și așază-te în scaun cu ajutorul unui însoțitor.
- **Pentru coborâre:** Pune frâna. Ține de cotieră și ridică-te cu ajutorul unui însoțitor.

Simbol	Descriere	Simbol	Descriere
	SUS		FRAGIL
	PĂSTRAȚI USCAT		Producător


Întreținere

- Verifică periodic piesele și șuruburile. Dacă se slăbesc, strânge-le pentru a evita pericolele.
- Pentru funcționare corectă, unge părțile mobile săptămânal.
- Curăță suprafața scaunului cu o cârpă moale și uscată.
- Păstrează perna și spătarul curate pentru a evita infecțiile pielii.
- Scaunul trebuie depozitat într-un loc uscat, bine ventilat, fără gaze corozive.
- Aruncă materialele consumabile conform reglementărilor.

Precauții


Suport picior mobil

- Montează suportul de picioare pe axul lateral al cadrului (Figura 4), apoi rotește-l până se fixează.
- Suporturile se pot roti în interior/exterior pentru a reduce lungimea scaunului.
- Pentru demontare: trage pur și simplu în sus.

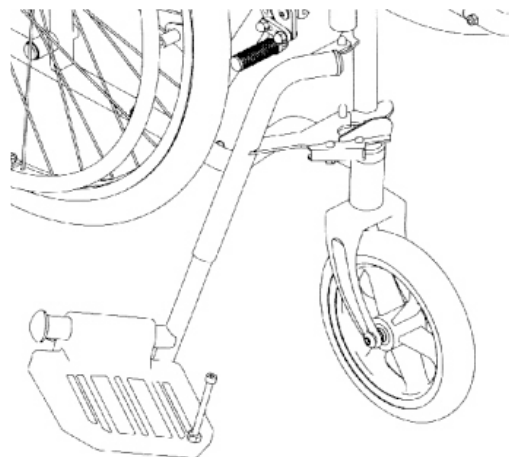


Reglare suport pentru picioare

- Slăbește zăvorul, apasă pe butonul de blocare și reglează lungimea dorită.
- Asigură-te că suportul este fixat complet și în siguranță (Figura 5).
- ⚠️ Asigură-te că suporturile sunt bine fixate înainte de utilizare.
- ⚠️ Cel mai jos punct al suportului trebuie să fie la cel puțin 6,5 cm de sol.
- ⚠️ Nu călca pe suporturi – există risc de răsturnare.

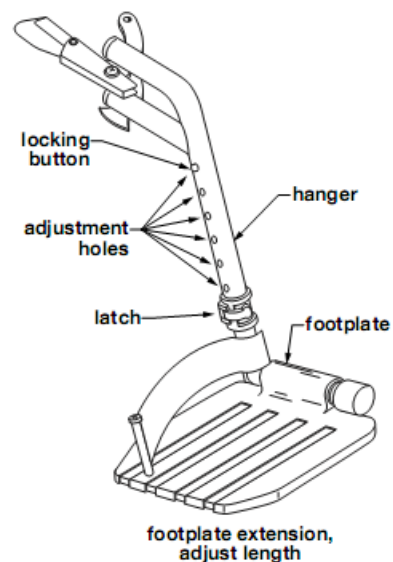

Rabatarea spătarului (parțial)

- Apasă paleta neagră spre spate cu degetul mare și trage mânerul în jos (Figura 6). Repetă pentru celălalt mâner.
- Pentru revenire: ridică ambele mânere și spătarul se va fixa automat.
- ⚠ Nu apăsa pe mânere pentru a ridica partea din față a scaunului.

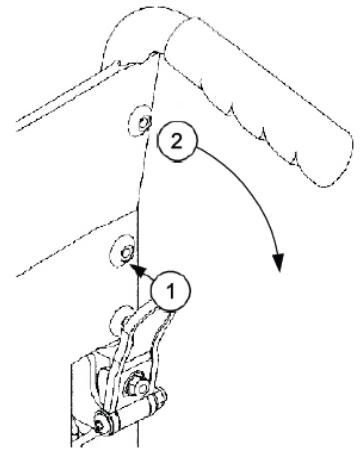

Demontare suport picioare

- Trage de pârghia de eliberare spre față, suportul va pivota spre exterior.
- Apoi ridică suportul pentru a-l scoate din balamalele scaunului.
- ⚠ Nu călca pe suporturi – risc de răsturnare.

Demontare cotieră

- Apasă butonul de arc și ridică cotiera din lăcașurile față și spate (Figura 7).

