



Kaiyang Medical



Scaun de Toaletă - Manual de Instrucțiuni

I. Prezentare Generală a Produsului

Acest scaun de toaletă obișnuit este special conceput pentru a satisface nevoile zilnice de utilizare a toaletei. Este potrivit pentru persoanele în vârstă, pentru cei cu mobilitate redusă sau pentru persoanele aflate în perioada de recuperare postoperatorie, oferind asistență sigură, confortabilă și convenabilă.

II. Structura Produsului

- **Șezut:** Proiectat pentru confort, cu un material moale și ușor de curățat, susținând eficient greutatea utilizatorului și reducând presiunea asupra feselor.
- **Spătar:** Ergonomic, urmând curba naturală a spatelui pentru susținere optimă, prevenind durerile de spate.
- **Mânere:** Oferă stabilitate la ridicare și așezare și pot fi utilizate pentru a sprijini obiecte mici.
- **Picioare:** Patru picioare stabile, realizate din materiale durabile, cu tampoane anti-alunecare pentru siguranță pe diverse suprafețe.
- **Recipient pentru reziduuri:** Detasabil, ușor de curățat, cu un strat anti-stropire pentru a preveni scurgerile accidentale.

III. Instrucțiuni de Utilizare

1. Așezați scaunul de toaletă pe o suprafață plană și uscată.
2. Utilizatorul se prinde de mânere, se întoarce încet cu spatele către spătar și se așază ușor, ajustându-se într-o poziție confortabilă.
3. După utilizare, scoateți cu atenție recipientul, aruncați conținutul, clătiți-l bine cu apă și detergent, apoi uscați-l înainte de a-l pune la loc.

IV. Precauții

- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a scaunului.
- Verificați periodic dacă piesele sunt slăbite și reparați-le sau înlocuiți-le dacă este necesar.
- Evitați plasarea scaunului într-un mediu umed sau expus la temperaturi ridicate.
- Copiii trebuie să utilizeze scaunul doar sub supravegherea unui adult.