



Targa pentru urgente
TM-C 3010





SISTEM DE RIDICARE FAȚĂ- SPATE

Acest sistem este utilizat pentru a transfera pacientul în poziția cea mai confortabilă. Este posibilă fixarea sistemului din spate într-un unghi în care pacientul este cel mai confortabil. Pentru a opera acest sistem, este posibil să apăsați zăvorul de funcționare așa cum se arată în imagine și să fixați sistemul de la 0 ° la 80 °.

SISTEM DE RIDICARE A PICIOARELOR DIN SPATE

Acest sistem este utilizat pentru a aduce picioarele pacientului în poziția cea mai potrivită și confortabilă și pentru a echilibra circulația sângelui pacientului. În funcție de starea pacientului, este posibilă ridicarea picioarelor până la 15°. După cum se vede în imagine, sistemul este fixat prin tragerea în sus a celor două suporturi de ridicare din oțel inoxidabil de pe lateral. Pentru a restabili sistemul, capetele acestor brațe sunt ridicate în sus și sistemul este scos din mecanismul de blocare.



Este o targă care poate fi scoasă din ambulanță sau încărcată în ambulanță de o singură persoană atunci când este necesar, picioarele pot fi pliate și desfăcute automat, corpul este rigid și are o structură solidă. Există balustrade pliabile pe ambele părți pentru transportul ușor și sigur al pacientului..

- (1) Există, de asemenea, o balustradă la capătul piciorului.
- (2) Șinele laterale, care se blochează automat atunci când sunt verticale, trebuie utilizate atunci când pacientul se află pe patul de targă. Două roți la capătul picioarelor pot fi rotite la 360° cu mișcare lină.
- (3) Cele două roți la capătul opus sunt fixe.
- (4) De asemenea, îi va permite să meargă pe targă la intrarea și ieșirea din ambulanță.

SISTEM DE ÎNCĂRCARE PLIABIL PENTRU PICIORUL DIN FAȚĂ

În timpul utilizării targii în spații înguste. În primul rând, ridicați suportul din spate, apoi pliați cadrul pliabil al roții de încărcare așa cum se arată.

Lăsați-l să cadă, glisați pârghiile de blocare spre partea cu capul pacientului. Blocare automată a manetelor atunci când cadrul este ridicat. Este încărcat cu arc pentru funcționare.



BRATE LATERALE

Aceste brațe sunt proiectate pentru sprijin lateral. Când este plasat în poziție verticală, acestea sunt blocate cu știftul de blocare. Ar trebui cu siguranță să fie folosit atunci când există un pacient pe targă. Când știftul de blocare este scos, brațul este eliberat și brațul este înclinat jos pentru a ajuta la coborârea pacientului.

DESCHIDEREA PICIOARELOR TARGII

Aduceți siguranța blocării picioarelor în poziția deschisă, coborâți tăblia capului până când roțile de încărcare ating solul. Strângeți manetele de control ale picioarelor din față și din spate. Când pliați șasiul, coborâți-l până când atinge solul.



RIDICAREA TARGII

Însoțitorii stau la ambele capete ale targii pliate. Însoțitorul de la capătul piciorului trebuie să se asigure că blocarea piciorului pliat este deschisă. Cu palmele în sus, ambii însoțitori ar trebui să se prindă de colțurile cadrului principal. Apoi, targa trebuie ridicată la o înălțime suficientă, astfel încât ambele perechi de picioare să poată fi deschise. **Nu încercați niciodată să ridicați targa de pe brațele laterale sau de pe suportul din spate.**



ÎNCĂRCAREA TARGII LA AMBULANȚĂ

Asigurați-vă că cadrul pliabil al roții de încărcare este ridicat și blocat. Apoi mutați blocarea piciorului targă pe partea dreaptă înainte în poziția deschisă. (Dacă acest lucru nu se face, sistemul piciorului din față al targii poate fi deteriorat.) Împingeți mai întâi capătul frontal al targii și conduceți până când deschiderea ușii vehiculului și roata de încărcare ating podeaua vehiculului.



Apoi strângeți pârghiile de control ale picioarelor. (Mai întâi brațul de control din dreapta)



După ce targa este deplasată înainte în vehicul, strângeți maneta de comandă a piciorului stâng atunci când piciorul din spate atinge vehiculul. Ca urmare a acestor operațiuni, targa va fi încărcată în vehicul



SCOATEREA TARGII DIN AMBULANȚĂ .

Scoateți targa din mecanismul de blocare, asigurați-vă că piciorul pliat este deblocat, prindeți cadrul principal al targii de capătul piciorului, scoateți-l din vehicul. (Nu strângeți brațele picioarelor drept și stâng.) În timp ce targa este scoasă, picioarele sale vor fi deblocate și blocate automat. Verificați dacă întregul sistem de picioare al targii este deschis sau închis. Este important ca picioarele din față să nu se deschidă, să nu scoată targa. .

CURĂȚAREA TARGII

Este necesară o bună îngrijire pentru a se asigura că pacientul și cei care utilizează echipamentul sunt mai puțin susceptibili de a fi infectați cu germeni purtători și sunt întreținuți corespunzător. Suprafețele metalice expuse sunt lustruite, acoperite sau tratate în alt mod pentru o întreținere

ușoară și un aspect plăcut. Va fi suficient să curățați aceste suprafețe cu detergent și apă caldă ori de câte ori este necesar. În situații extreme de poluare, în special targa poate fi utilizată pentru depozitarea pe termen lung etc. Poate fi necesar să ștergeți targa cu o cârpă înmuiată în kerosen înainte de a utiliza săpun și apă. După curățare, uscați bine targa cu un prosop moale. Dacă este necesar, pulverizați aer comprimat cu compresorul. Odată ce targa este uscată, puteți aplica ceară auto pe toate suprafețele lustruite, dacă doriți. Suprafețele din cauciuc pot fi ușor pulverizate cu spray siliconic.

INFORMAȚII PRIVIND ÎNTREȚINEREA

Toți rulmenții arborelui, îmbinările pivotante. De asemenea, lubrifiați toate suprafețele glisante cu unsoare albă de litiu. Ștergeți tot excesul de ulei înainte de a pune targa din nou în funcțiune. Lubrifiați pentru utilizare ușoară (o dată pe săptămână). Lubrifiați la fiecare trei luni în condiții moderate de utilizare. Lubrifiați la fiecare 30 de zile în condiții de utilizare intensă.

CONTROLUL ȘURUBURILOR

Verificați capul străin, șuruburile speciale ale corpului lateral de pe corpul principal o dată pe săptămână. Dacă este slăbit, strângeți dacă este necesar. De asemenea, verificați celelalte șuruburi cu piulițe pe targă o dată pe săptămână. Aceste șuruburi se pot slăbi în condiții grele de lucru. Aceste slăbiri provoacă goluri pe corp în timp și dăunează aerodinamicii targii. Agitarea are loc în corpul targă. Pentru a nu provoca acest lucru, trebuie acordată importanță întreținerii săptămânale